

LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA

PEDIÁTRICO Y NEONATAL (MILLER Y MAC)


RLEM048

RLEM048 Laringoscopio pediátrico/neonatal con guía de luz de fibra óptica integrada y LED de alta intensidad, diseñado para intubación segura y precisa en quirófano y urgencias. Su construcción en acero inoxidable, hojas selladas y autoclavables facilitan limpieza y reprocesamiento. Incluye maleta de transporte y un set mixto de hojas **Miller (rectas)** y **Macintosh (curvas)** para cubrir desde recién nacidos hasta lactantes.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Iluminación LED con F/O integrada:** haz claro, concentrado y sin sombras.
- **Kit mixto:** hojas rectas Miller #00, #0, #1 y curvas Macintosh #0, #1 (neonatal–pediátrico).
- **Acople estable** con acción suave (mecanismo de precisión) para apertura y bloqueo firmes.
- **Ergonomía y balance** que facilitan la visualización glótica.
- **Estuche rígido** incluido para orden y traslado del set.

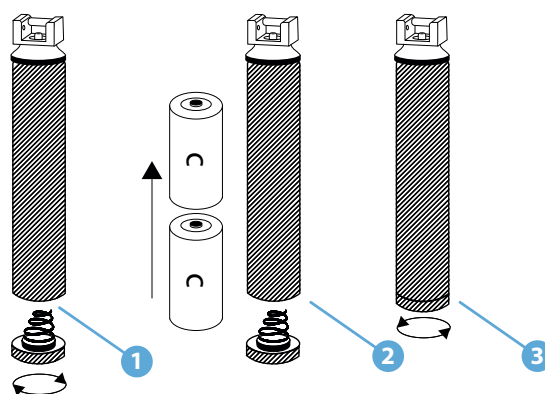

LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA

PEDIÁTRICO Y NEONATAL (MILLER Y MAC)

RLEM048

TAMAÑO DE HOJA	LARGO TOTAL DE LA HOJA	ANCHO	
MAC 0	8,4 CM	1,15 CM	✓
MAC 1	9,5 CM	1,15 CM	✓
MILLER 00	6,8 CM	1,5 CM	✓
MILLER 0	8 CM	1,5 CM	✓
MILLER 1	10,5 CM	1,5 CM	✓

MODO DE USO:

Inspección previa

- Verifique que hoja y mango no tengan aristas ni daños.

Inserte 2 pilas

- AA en el mango respetando polaridad

- **Acople la hoja al mango hasta oír/bloquear** - Verifica encendido del LED y continuidad de la fibra.

Uso clínico

- Realice el procedimiento según protocolo institucional por personal entrenado.

Tras el uso

- Retire la hoja, desmonte el mango, extraiga las pilas y proceda a limpieza/esterilización.



LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA

PEDIÁTRICO Y NEONATAL (MILLER Y MAC)

RLEM048

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA PEDIÁTRICO Y NEONATAL (MILLER Y MAC)
Código	RLEM048
Peso neto producto (aprox)	800 gramos
Dimensiones estuche	4,2 cm (Largo) x 22,6 cm (Ancho) X 17,2 (Alto) / Incluye maleta de transporte
Iluminación	Hyper LED con guía de fibra óptica (luz blanca, uniforme).
Energía (mango)	2×C (medium) / 2×AA (slim) / 2×AA en portabaterías (stubby).
Contenido del set	5 hojas (Miller #00, #0, #1; Macintosh #0, #1)
Material de hojas	Acero inoxidable; canal de fibra óptica integrado (monopieza).
Esterilización	Hojas selladas y autoclavables; seguir protocolo del centro.
Compatibilidad	Hojas rectas y curvas que cumplan ISO 7376 (sistema estándar de acople).
Presentación	Maleta/estuche de transporte para set completo.
Procedencia	India
Marca	Scope Medical
Certificación	CE –FDA –ISO13485
Garantía	12 meses




LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA

PEDIÁTRICO Y NEONATAL (MILLER Y MAC)

RLEM048

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

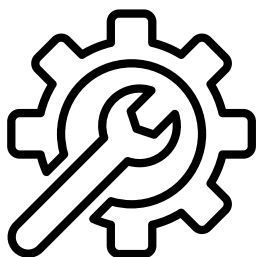

- Retira las pilas del mango antes de limpiar o almacenar.
- Hojas: limpieza, desinfección y esterilización en autoclave según protocolo del establecimiento (seguir parámetros validados).
- Mango con LED: limpiar manualmente con paño suave y detergente neutro - No autoclaves el mango con baterías.
- Seca completamente antes de guardar en la maleta.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Verifica intensidad de luz y estado de FO antes de cada uso- Reemplaza pilas si el brillo disminuye.
- Evita agentes corrosivos (lejía, ácidos) y cepillos metálicos sobre la óptica.
- Almacena el set seco, a temperatura ambiente, dentro de la maleta.
- Utiliza hojas del tamaño adecuado al paciente para minimizar traumatismos.

