

LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO MACINTOSH

FIBRA ÓPTICA -REUTILIZABLE


RLEM022

RLEM022 Laringoscopio reutilizable tipo Macintosh diseñado para intubación orotraqueal segura y precisa. Incorpora iluminación Hyper LED transmitida por fibra óptica (FO) —disponible con guía integrada o módulo FO desmontable que entrega luz blanca, uniforme y sin sombras. Construcción 100 % acero inoxidable, hojas selladas y autoclavables, ideal para pabellón, urgencias y ambulancia. Incluye maleta de transporte.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Sistema óptico Hyper LED + Fibra Óptica (FO)** integrada o modular): luz natural, brillante y sin sombras, ideal para visualización precisa del glotis.
- **Juego completo de 4 hojas curvas MAC** (Nº 1–4) para cobertura pediátrica–adulto.
- **Construcción** en acero inoxidable con hojas selladas, más fácil de limpiar, almacenar y mantener - Autoclavable.
- **Guía de luz de cuarzo** “fibras superfínas”: entrega homogénea que evita sombras negras.
- **Mango con LED** y encastre Macintosh robusto (rodamientos de bolas con resortes triples) para acople firme y encendido confiable.

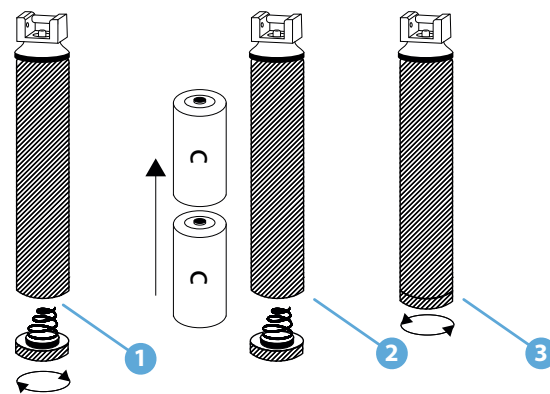

LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO MACINTOSH

FIBRA ÓPTICA -REUTILIZABLE

RLEM022

TAMAÑO DE HOJA	LARGO TOTAL DE LA HOJA	ANCHO	
MAC 1	9,5 CM	1,15 CM	✓
MAC 2	12 CM	1,4 CM	✓
MAC 3	14 CM	1,7 CM	✓
MAC 4	16,5 CM	1,7 CM	✓

MODO DE USO:

Inspección previa

- Verifique que hoja y mango no tengan aristas ni daños.

Colocación de batería(s)

- Mango medium: 2× C.
- Mango slim: 2× AA.
- Mango stubby: 2× AA en portabaterías (respete polaridad).

Acople hoja MAC

- Talla según paciente) al mango - Verifica encendido del LED y continuidad de la fibra.

Uso clínico

- Proceda con la técnica de laringoscopia Macintosh habitual.

Tras el uso

- Retire baterías si el equipo quedará almacenado por periodos largos. Desmonte según el modelo y pase a limpieza / desinfección.



LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO MACINTOSH

FIBRA ÓPTICA -REUTILIZABLE

RLEM022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	LARINGOSCOPIO MACINTOSH FIBRA ÓPTICA
Código	RLEM022
Peso neto producto (aprox)	750 gramos
Dimensiones estuche	5 cm (Largo) x 25,5 cm (Ancho) X 20 (Alto) / Incluye maleta de transporte
Iluminación	Hyper LED con guía de fibra óptica (luz blanca, uniforme).
Energía (mango)	2×C (medium) / 2×AA (slim) / 2×AA en portabaterías (stubby).
Esterilización por vapor	Autoclave 132 °C a 2,25 bar por ≥4 min (desplazamiento por gravedad).
Desinfección química permitida	OPA (Cidex® OPA) o glutaraldehído 2,4 % (seguir tiempos del fabricante).
Compatibilidad RM	usar solo versiones "MR Conditional" en entorno de RM.
Procedencia	India
Marca	Scope Medical
Certificación	CE -FDA -ISO13485
Garantía	12 meses




LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO MACINTOSH

FIBRA ÓPTICA -REUTILIZABLE

RLEM022

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

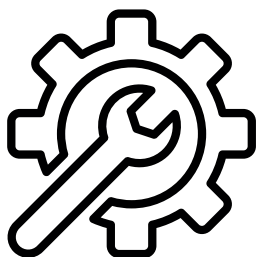

- Retira las pilas del mango antes de limpiar o almacenar.
- Hojas: limpieza, desinfección y esterilización en autoclave según protocolo del establecimiento (seguir parámetros validados).
- Mango con LED: limpiar manualmente con paño suave y detergente neutro - No autoclaves el mango con baterías.
- Seca completamente antes de guardar en la maleta.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Verifica intensidad de luz y estado de FO antes de cada uso- Reemplaza pilas si el brillo disminuye.
- Evita agentes corrosivos (lejía, ácidos) y cepillos metálicos sobre la óptica.
- Almacena el set seco, a temperatura ambiente, dentro de la maleta.
- Utiliza hojas del tamaño adecuado al paciente para minimizar traumatismos.

