

RESCATE Y EMERGENCIA

MOCHILA EMERGENCIA

BAGLIFE

BL107

BL107 La mochila de emergencia está diseñada para el transporte seguro y organizado de insumos y equipamiento médico en contextos de rescate, atención prehospitalaria y traslados asistenciales. Su formato tipo mochila permite liberar las manos del profesional y distribuir la carga en la espalda, favoreciendo la movilidad en escaleras, terrenos irregulares o desplazamientos prolongados.

Gracias a su estructura de gran capacidad, con apertura completa y múltiples compartimentos internos y externos, facilita la visualización del contenido y la rápida localización del material según el tipo de procedimiento, contribuyendo a una atención más eficiente y ordenada en situaciones de emergencia.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Material resistente:** confeccionada en tela Oxford ligera, duradera y resistente al desgaste y la suciedad.
- Gran capacidad y apertura total:** diseño tipo libro que permite visualizar y acceder al contenido completo de la mochila.
- Organización interna:** paneles con bolsillos de malla y correas de sujeción para ordenar insumos y equipo según protocolo.
- Compartimentos externos:** cuatro compartimentos laterales y frontal, más bolsillo superior independiente de acceso rápido.
- Sistema de transporte ergonómico:** respaldo acolchado, correas de hombro ajustables y correas de apoyo adicionales para una mejor distribución de carga.



RESCATE Y EMERGENCIA

MOCHILA EMERGENCIA

BAGLIFE

BL107

- **Identificación y visibilidad:** bolsillo transparente para tarjeta identificatoria y bandas reflectantes p mayor visibilidad en entornos de baja iluminación

MODO DE USO:

- **Verificar que la mochila** se encuentre limpia y en buen estado antes de la carga.
- **Distribuir insumos y equipamiento** en el compartimento principal y en los compartimentos externos, siguiendo los protocolos internos de organización.
- **Utilizar bolsillos de malla**, correas elásticas y sujeciones internas para fijar adecuadamente el contenido y evitar desplazamientos durante el traslado.
- **Colocar la tarjeta de identificación** en el bolsillo transparente exterior con los datos actualizados del servicio o del kit.
- **Ajustar las correas de hombro y las correas de apoyo** adicionales hasta lograr un calce cómodo y estable para el usuario.
- **Tras cada operativo**, vaciar el material residual, reponer lo utilizado y dejar la mochila nuevamente preparada para la siguiente salida.



RESCATE Y EMERGENCIA

MOCHILA EMERGENCIA

BAGLIFE

BL107

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	MOCHILA EMERGENCIA BAGLIFE
Código	BL107
Peso neto producto	2,35 kg
Dimensiones producto	60 cm (Alto) x 50 cm (Ancho) x 34 cm (Fondo) Volumen geométrico ≈ 102 L útiles
Material	Tela Oxford ligera e impermeable, resistente al desgaste y la suciedad; interior de fácil limpieza.
Color / visibilidad	Rojo con cintas reflectantes de alta visibilidad.
Organización integrada	Compartimento principal de apertura total con paneles interiores, bolsillos de malla y correas de sujeción.
Bolsillería externa	Cuatro compartimentos laterales y frontales, más bolsillo superior independiente para acceso rápido.
Cierres / herrajes	Cremalleras dobles con tiradores de alta resistencia y costuras reforzadas.
Base	Fondo reforzado con estructura semirrígida para mayor estabilidad.
Identificación / entrega	Bolsillo transparente exterior para tarjeta de identificación; se entrega vacío (sin insumos).
Sistema de transporte	Correas acolchadas ajustables, respaldo ergonómico y correas de apoyo para distribución de carga.
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife / BagLife
Certificación	CE – ISO13485
Garantía	12 meses




RESCATE Y EMERGENCIA

MOCHILA EMERGENCIA

BAGLIFE

BL107

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

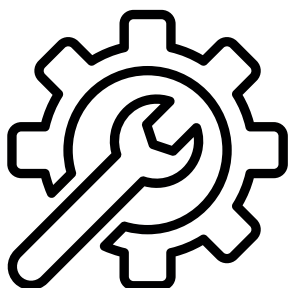

- Limpiar la superficie externa con paño húmedo y detergente neutro, retirando polvo y suciedad acumulada.
- Dejar secar completamente a la sombra antes de guardar, evitando exponer la mochila a fuentes directas de calor.
- Revisar de forma periódica costuras, cierres, tiradores y correas para detectar desgaste o daño y gestionar su reparación o reemplazo.
- Ventilar el interior después de cada jornada, especialmente si se ha trabajado en ambientes húmedos o con derrames.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- No exceder la capacidad de carga recomendada, para evitar tensiones excesivas sobre cierres y correas.
- Mantener una organización interna constante, respetando los protocolos del servicio para reducir tiempos de búsqueda durante la atención.
- Ajustar correctamente las correas antes del traslado para asegurar una adecuada distribución del peso en la espalda del usuario.
- Sustituir la mochila si se identifican daños estructurales que comprometan la seguridad del contenido o del personal.

