

OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO D – PIN INDEX

(OXÍGENO)

RL206

RL206 El Cilindro de Oxígeno Tipo D con conexión Pin Index está diseñado para entregar portabilidad y seguridad, siendo una alternativa práctica para usuarios que requieren transportar su suministro personal de forma frecuente, así como para uso en entornos domiciliarios, clínicos y de emergencia, facilitando la continuidad del tratamiento y la respuesta en terreno.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Portabilidad para uso continuo:** pensado para usuarios y equipos que necesitan trasladar oxígeno de forma frecuente, manteniendo el suministro siempre disponible.
- **Estructura liviana y robusta:** fabricado en aleación de aluminio resistente a la presión, adecuada para exigencias de uso clínico y prehospitario.
- **Conexión Pin Index (tipo yugo):** sistema estandarizado que permite un acople seguro con reguladores compatibles, facilitando una operación rápida y ordenada.
- **Operación práctica en terreno:** diseño que favorece una manipulación controlada al conectar y retirar accesorios durante la atención.
- **Traslado versátil:** compatible con carro de transporte o bolso, adaptándose a rutinas domiciliarias, clínicas o de emergencia.
- **Uso en distintos entornos:** apropiado para oxigenoterapia en hogar y apoyo en centros clínicos, ambulancias y rescate.
- **Identificación visual del equipo:** cúpula blanca y cuerpo aluminio (según unidad), facilitando su ubicación dentro del set de oxigenoterapia.
- **Trazabilidad y control:** marcados visibles en el cilindro (según unidad) para inventario, control interno y mantenciones.



OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO D – PIN INDEX

(OXÍGENO)

RL206

MODO DE USO

- **Inspección previa:** verificar el estado general del cilindro y que la conexión esté limpia antes de conectar accesorios.
- **Conexión del regulador:** instalar un regulador compatible tipo yugo (Pin Index) siguiendo el manual del regulador y asegurando el montaje.
- **Operación segura:** utilizar siguiendo protocolo para oxígeno medicinal; evitar fuentes de ignición y mantener el entorno libre de contaminantes.
- **Cierre:** al finalizar, cerrar el cilindro, retirar accesorios y guardar asegurado para transporte o almacenamiento.



OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO D – PIN INDEX

(OXÍGENO)

RL206

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CILINDRO TIPO D – PIN INDEX
Código	RL206
Gas	Oxígeno (O ₂)
Capacidad	0.425 m ³ / 425 L
Presión de servicio	2015 psi (según marcaje DOT-3AL 2015 en el cilindro)
Material	Aleación de aluminio (resistente a la presión)
Peso (vacío)	2,7 kg
Dimensiones	Alto: 51 cm / Diámetro: 12 cm
Válvula / Conexión:	Tipo Pin Index (conexión para regulador yugo)
Autonomía estimada (según flujo)	15 L/min: 28 min · 10 L/min: 43 min · 6 L/min: 1 hr · 2 L/min: 3:30 hr
Acabado/Color:	Cúpula blanca y cuerpo en aluminio (acabado metálico).
Identificación del gas	Oxígeno (O ₂), identificado por marcaje/rotulación del cilindro.
Procedencia	EE.UU.
Marca	RescateLife
Certificación	CE - DOT (EE.UU.)
Garantía	12 meses

* No incluye carga. Indicar en la cotización si se requiere el cilindro con carga.




OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO D – PIN INDEX

(OXÍGENO)

RL206

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

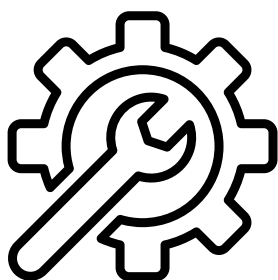

- Limpieza exterior con paño suave y detergente neutro; secar completamente.
- Evitar productos abrasivos o solventes agresivos.
- Mantener válvula y conexiones libres de polvo/partículas.
- Realizar inspecciones periódicas conforme a protocolo interno y normativa aplicable.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- No utilizar oxígeno a presión sin conocer la manipulación correcta de cilindros y reguladores.
- Mantener alejado de fuentes de ignición y evitar combustión cercana al entorno de uso.
- Evitar combustibles, especialmente aceites o grasas, en cercanías del oxígeno.
- Transportar siempre asegurado (en bolso/soporte) para prevenir golpes o caídas.
- Almacenar en lugar ventilado, seco y protegido.

