

MUEBLES CLÍNICOS

MWS 320 - LEVEL UP

3 MEDIDAS DISTINTAS (53 CM · 63 CM · 70 CM)

RL775

RL775 La MWS 320 – LEVEL UP Camilla bi-articulada para ambulancias con pliegue independiente de las piernas, diseñada para reducir el esfuerzo de carga/descarga y aumentar la seguridad operativa. Chasis de duraluminio con uniones en polímero (sin soldadura); barandas rebatibles con doble cierre, cinturón de 4 puntos y kit de anclaje para fijación vehicular. Colchoneta impermeable, auto-extinguible y cosida electrónicamente. No apta para RM.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Arquitectura bi-articulada + pliegue independiente:** facilita la colocación y retiro desde la ambulancia con menor esfuerzo y mayor control.
- Chasis de duraluminio con uniones en polímero (sin soldadura):** alta rigidez y menor peso.
- Barandas rebatibles** con doble cierre y cinturón de 4 puntos con acople automático.
- Colchoneta** sellada electrónicamente, impermeable y auto-extinguible (higiene rápida).
- Frenos** de ruedas y sistema anti-caída durante la operación.
- Anclaje** vehicular incluido para fijación rápida.
- Respaldo (Fowler)** multiposición para confort y manejo clínico.
- Compatible** con accesorios Sitmed (soporte de suero y de cilindro O₂).
- Traba de seguridad** para evitar desarme accidental



MUEBLES CLÍNICOS

MWS 320 - LEVEL UP

3 MEDIDAS DISTINTAS (53 CM · 63 CM · 70 CM)

RL775

Manija trasera de transporte · Conjunto con pin-rey (traba de ambulancia) · Ruedas con freno · Manija de despliegue · Cinturones 4 puntos · Colchoneta sellada · Uniones de polímero · Ruedas auxiliares 3" · Barandas rebatibles (accionamiento doble) · Sistema anti-caída · "Rodillas" plegables · Estructura en duraluminio tubular · Respaldo Fowler multiposición · Piernas delanteras con topes de PVC · Ruedas de ataque con ajuste fino de altura.

MODO DE USO:

Preparación

- Estacione en superficie nivelada; active frenos de la camilla y verifique que el anclaje de la ambulancia esté libre.

Carga a la ambulancia

- Alinee la camilla y empuje hasta que los topes delanteros contacten el parachoques.
- Accione la palanca para plegar las piernas delanteras; deslice parcialmente hacia adentro.
- Avance hasta que los topes traseros contacten la puerta; accione la palanca opuesta para plegar las piernas traseras.
- Empuje hasta que el anclaje vehicular haga "clic".

Descarga

- Desbloquee el anclaje y extraiga hasta liberar los topes traseros; despliegue piernas traseras.
- Continúe la extracción y despliegue piernas delanteras; active frenos antes de transferir.

Notas operativas

- En pendientes/desniveles, puede requerir elevar levemente la parte trasera para asistir el plegado de las "rodillas".
- Mantener barandas arriba durante el traslado y asegurar con cinturón de 4 puntos.



MUEBLES CLÍNICOS

MWS 320 - LEVEL UP

3 MEDIDAS DISTINTAS (53 CM · 63 CM · 70 CM)

RL775

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	MWS 320 - LEVEL UP
Código	RL775
Tipo	Camilla bi-articulada, 2 patas plegables
Estructura	Duraluminio + uniones en polímero (sin soldadura).
Barandas	Rebatibles con doble cierre automático.
Respaldo (Fowler)	6 niveles de ajuste.
Ruedas	Banda de goma con freno, Ø 12,7 cm
Dimensiones del lecho	190,5 cm (Largo) · 60 cm (Ancho)
Dimensiones totales	60 cm (Ancho) · 207-226 cm (Largo)
Altura de entrada	53-72 cm (rango)
Versiones y altura de Carga (3 Medidas)	Codigo RL775 - 5 53 cm Codigo RL775 - 6 63 cm Codigo RL775 - 7 70 cm
Capacidad de carga	300 kg (estática) · 150 kg (dinámica)
Compatibilidad RM	No apta.
Pesos de producto	Neto 37 kg · Bruto 40 kg
Anclaje vehicular	Incluido (kit de fijación).
Procedencia	Brasil
Marca	SITMED
Certificación	CE
Garantía	12 Meses




MUEBLES CLÍNICOS

MWS 320 - LEVEL UP

3 MEDIDAS DISTINTAS (53 CM · 63 CM · 70 CM)

RL775

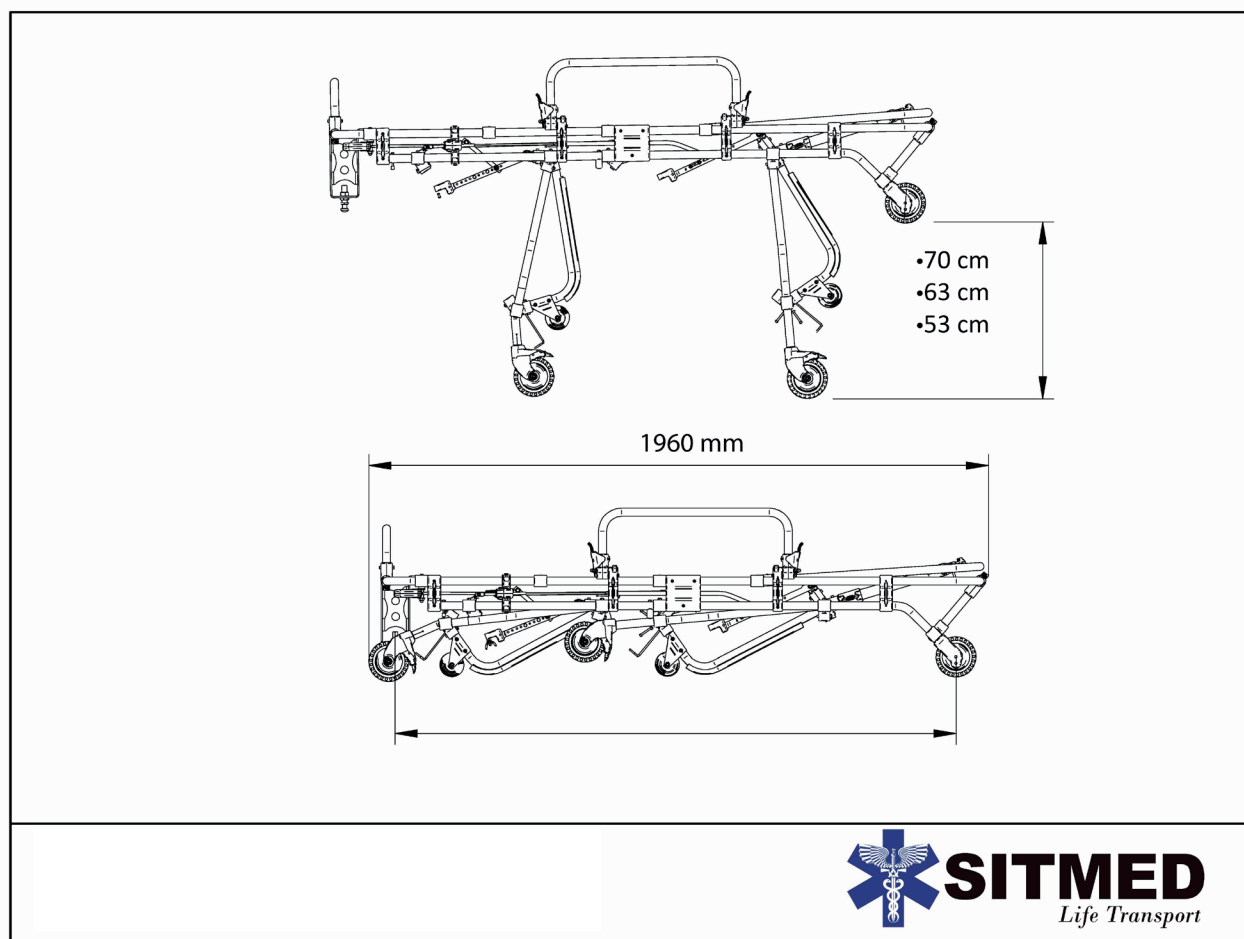

ACCESORIOS OPCIONALES

■ RLIMP018 — Mesa de trabajo porta-monitor (Med Rac / SMS 940): plataforma plegable para monitor/desfibrilador y bombas; capacidad del accesorio 30 kg; correas de velcro superiores y cinturones de fijación a la camilla.

■ RLIMP017 — Soporte vertical para cilindro de O₂: admite cilindros hasta Ø 23 cm; correas ajustables, base de apoyo y tope de pared para transporte interno.




MUEBLES CLÍNICOS

MWS 320 - LEVEL UP

3 MEDIDAS DISTINTAS (53 CM · 63 CM · 70 CM)

RL775

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

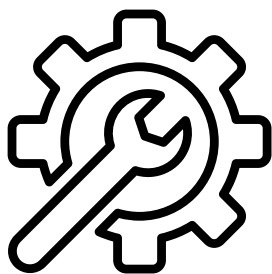

- Limpieza: paño suave + detergente neutro; desinfección con amonio cuaternario o alcohol 70 % compatibles con PVC/polímeros.
- Chequeo periódico: frenos, bloqueos de barandas, cinturones, mecanismos de plegado y anclaje; lubricar pivotes si aplica.
- Evitar solventes/cloro concentrado y abrasivos. Almacenar seca y anclada.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Uso por personal capacitado (idealmente 2 operadores).
- Activar frenos en transferencias y verificar anclaje antes de liberar peso.
- Respetar 300 kg estática / 150 kg dinámica.
- Mantener manos/ropa lejos de zonas de cizallamiento en el plegado/despliegue.

