

RESCATE Y EMERGENCIA

BOLSO EMERGENCIA

BAGLIFE

BL106

BL106 Bolso de emergencia de alta resistencia diseñado para respuesta rápida en terreno. Su exterior de Oxford recubierto protege frente a lluvia ligera, suciedad y abrasión, mientras que el interior acolchado e impermeable resguarda dispositivos y consumibles. La apertura amplia y los organizadores elásticos y de malla permiten ver y tomar cada elemento sin vaciar el compartimiento. Incorpora bandas reflectantes para visibilidad 360°, manillas reforzadas con unión por velcro y correa de hombro acolchada con herrajes metálicos para traslado cómodo y seguro.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Acceso 360° y organización inteligente.** Abertura superior de gran amplitud y bolsillos de malla con cierre en la tapa; panel frontal con elásticos y bolsillos de malla; laterales con compartimentos modulares de acceso independiente y bolsillo trasero longitudinal.
- Transporte cómodo y seguro.** Asas superiores acolchadas para porte manual y correa de hombro regulable y desmontable con hombrera; herrajes metálicos y anclajes reforzados que resisten el uso intensivo.
- Visibilidad en terreno.** Bandas reflectantes en caras frontal y laterales, visibles con linterna o luz vehicular para operar de noche o en ambientes de baja iluminación.
- Base resistente.** Fondo con patines /antideslizantes y panel anti-abrasión que prolonga la vida útil al apoyar el bolso en superficies ásperas.



RESCATE Y EMERGENCIA

BOLSO EMERGENCIA

BAGLIFE

BL106

- **Cierres y terminaciones.** Cierres de doble cursor con tiradores de fácil prensión y costuras reforzadas en puntos de carga; interior en color claro para ubicar rápidamente los elementos.
- **Identificación rápida.** Porta-tarjeta transparente superior para rotular servicio, unidad o kit.



MODO DE USO:

- **Rotule el porta-identificación** y defina zonas internas (vía aérea, curación, control, fármacos).
- **Ordene insumos** de uso inmediato en la tapa y panel frontal; reserve los laterales para sets específicos y el bolsillo trasero para textiles y papelería.
- **Ajuste el largo de la correa** y verifique que los cierres deslicen sin trabas antes del traslado.
- **Tras la atención,** reponga y deje visibles los consumibles críticos para el siguiente uso.



RESCATE Y EMERGENCIA

BOLSO EMERGENCIA

BAGLIFE

BL106

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	BOLSO EMERGENCIA BAGLIFE
Código	BL106
Peso neto producto	1,30 kg
Dimensiones estuche	33 cm (Largo) x 41 cm (Ancho) X 31,5 (Alto)
Volumen geométrico	≈ 36 L útiles (≈ 42,6 L geométricos)
Material	Tela Oxford de alta tenacidad, resistente al desgaste; interior easy-clean.
Color / visibilidad	Rojo con ribetes grises y bandas reflectantes
Organización integrada	Compartimento principal de apertura 180° con separadores y bolsillos de malla; tapa con organizador con cierre.
Bolsillería externa	7 compartimentos externos totales: frontal abatible organizado, módulos laterales independientes, bolsillo trasero plano y bolsillo superior con malla.
Cierres / herrajes	Cremalleras doble cursor; mosquetones y anclajes metálicos; tiradores de alto contraste.
Base	Placa reforzada en el fondo con 2 patines antideslizantes.
Identificación / entrega	Porta-tarjeta superior; se entrega vacío (sin insumos).
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife / BagLife
Certificación	CE – ISO13485
Garantía	12 meses




RESCATE Y EMERGENCIA

BOLSO EMERGENCIA

BAGLIFE

BL106

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

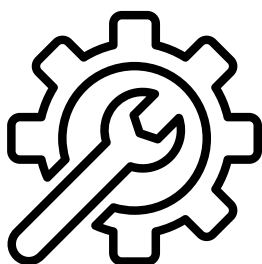

- Retira el contenido y aspira o sacude residuos sólidos; limpia la superficie con paño húmedo y detergente neutro.
- Desinfecta el interior con solución compatible con textiles (amonio cuaternario o similar) y deja secar a la sombra.
- Lubrica suavemente los cursores de las cremalleras si notas fricción; evita productos oleosos en el textil.
- Revisa costuras, anclajes y patines; reemplaza o repara piezas sueltas antes de volver a servicio.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Evita el sobrecarga y la compresión prolongada que deformen paneles y separadores.
- No apoyes el bolso sobre superficies cortantes o calientes; usa siempre la base con patines.
- Almacena en lugar seco y ventilado, lejos de radiación solar directa o agentes químicos.
- Rotula el porta-tarjeta y mantén una lista de contenido para reposición rápida post-operativo.

