

OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO 15 L/MIN

DOBLE OXÍGENO DISS

RL386

RL386 Flujómetro doble para oxigenoterapia

que permite conmutar con un mando giratorio entre salida directa a cánula/mascarilla, dispositivo de nebulización o humidificador, sin interrumpir el suministro de O_2 . Incorpora dos columnas (0–15 L/min) y conjunto robusto: cuerpo de latón niquelado (>40) con acabado cromado, tubo/cubierta de policarbonato de alto impacto, volante ergonómico de aluminio anodizado y conexión mural DISS con salida estándar 9/16–18 (americano); el conjunto en “Y” de aluminio minimiza fugas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Doble vía independiente (2x 0–15 L/min):** entrega simultánea o alternada según necesidad clínica.
- **Mando de conmutación:** cambia entre salida directa / nebulización / humidificador sin cortar el flujo.
- **Conexión** mural DISS con salida 9/16–18 para humidificador; “Y” de aluminio que asegura estanqueidad.
- **Construcción de alta durabilidad:** latón niquelado (>40) + cromo, tubo y tapa de policarbonato de alto impacto; volante de aluminio anodizado.
- **Lectura** clara en columna rotámetro y perillas de ajuste fino para control progresivo del caudal.



OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO 15 L/MIN

DOBLE OXÍGENO DISS

RL386

MODO DE USO

Preparación

- Verificar toma de O₂ operativa y dejar ambas perillas en 0 L/min.
- Revisar fijaciones, que la columna esté íntegra/vertical y que el humidificador (si aplica) tenga agua destilada.

Instalación

- Acoplar el conjunto al punto mural DISS; asegurar firme a mano.
- Conectar la cánula/mascarilla, nebulizador o humidificador a la salida 9/16–18 (si corresponde).

Ajuste y operación

- Seleccionar con el mando giratorio la salida requerida (directa/nebulizador/humidificador).
- Ajustar cada columna lentamente hasta el caudal prescrito (leer por el centro del flotador).
- Confirmar flujo efectivo (burbujeo si usa humidificador) y ausencia de fugas.

Cierre

- Volver a 0 L/min, cerrar la toma, desconectar accesorios y limpiar el exterior.



OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO 15 L/MIN

DOBLE OXÍGENO DISS

RL386

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	FLUJOMETRO 15 L/MIN DOBLE OXÍGENO DISS
Código	RL386
Configuración	Doble flujómetro con mando de conmutación de salidas.
Rango de flujo	2 × 0–15 L/min (rotámetro).
Conexión de entrada	Mural DISS (centro del conjunto).
Salidas	Directa / nebulizador / humidificador 9/16–18 (americano).
Material del cuerpo	Latón con niquelado (>40) y acabado cromado.
Columna / cubierta	Polycarbonato de alto impacto (transparente).
Volantes	Aluminio anodizado (ergonómicos).
Conjunto distribuidor	“Y” de aluminio liviano, diseñado para evitar fugas.
Lectura	Vertical, por centro del flotador (L/min).
Dimensiones del producto	15 (Ancho) × 14,3 (Alto) cm — Peso: 465 gramos
Dimensiones embalaje	16 (Ancho) × 15 (Alto) × 13 (Largo) cm — Peso: 540 gramos
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE; diseñado para cumplir CGA / HCA / FDA.
Garantía	6 meses




OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO 15 L/MIN

DOBLE OXÍGENO DISS

RL386

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

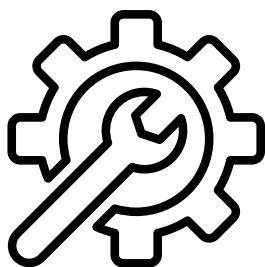

- Desconectar del punto DISS y cerrar la toma antes de intervenir.
- Limpieza externa con paño + detergente neutro; desinfección con agente compatible (evitar solventes/abrasivos).
- Inspección periódica: juntas, roscas, perillas y columnas; reemplazar piezas dañadas o agrietadas y verificar estanqueidad.
- Almacenar seco, protegido de golpes / UV / temperaturas extremas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Uso exclusivo con O₂, por personal capacitado; confirmar compatibilidad DISS antes de conectar.
- Mantener las columnas perfectamente verticales; no superar 15 L/min por vía.
- Evitar tracción del circuito; utilizar alivio de tensión si es necesario.
- Retirar de servicio ante fugas, daños o lectura inestable persistente.

