

OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO 15 L/MIN

DOBLE OXÍGENO OHMEDA

RL385

RL385 Flujómetro doble para oxigenoterapia que optimiza tiempo y operación clínica: mediante un mando giratorio permite conmutar entre salida directa a cánula/mascarilla, nebulizador o humidificador, sin interrumpir el suministro de O_2 . Incorpora dos columnas 0–15 L/min y un conjunto robusto: cuerpo de latón niquelado (>40) con acabado cromado, tubo/cubierta de policarbonato de alto impacto, volantes de aluminio anodizado y conexión rápida Ohmeda; la salida a humidificador es rosca 9/16–18 “americana”. El distribuidor en “Y” de aluminio minimiza fugas y lleva conector mural Ohmeda al centro.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Doble vía independiente (2x 0–15 L/min):** entrega simultánea o alternada, según necesidad clínica.
- **Mando de conmutación:** cambia entre directa / nebulizador / humidificador sin cortar el flujo.
- **Conexión rápida Ohmeda** con salida 9/16–18 para humidificador; “Y” de aluminio que asegura estanqueidad.
- **Construcción de alta durabilidad:** latón niquelado + cromo, columna/cubierta de policarbonato; volantes de aluminio anodizado ergonómicos.



OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO 15 L/MIN

DOBLE OXÍGENO OHMEDA

RL385

MODO DE USO

Preparación

- Verificar toma O₂ operativa y dejar ambas perillas en 0 L/min.
- Revisar fijaciones, verticalidad de columnas e integridad de la "Y" y conexiones.

Instalación

- Acoplar el conjunto al punto mural Ohmeda a mano hasta fijación segura.
- Conectar cánula/mascarilla, nebulizador o humidificador 9/16-18 (si corresponde).

Ajuste y operación

- Seleccionar con el mando la salida requerida (directa / nebulizador / humidificador).
- Abrir gradualmente cada vía hasta el caudal prescrito (leer al centro del flotador).
- Confirmar flujo efectivo y ausencia de fugas.

Cierre

- Volver a 0 L/min, cerrar la toma, desconectar accesorios y limpiar el exterior.



OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO 15 L/MIN

DOBLE OXÍGENO OHMEDA

RL385

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	FLUJOMETRO 15 L/MIN DOBLE OXÍGENO OHMEDA
Código	RL385
Configuración	Doble flujómetro con mando de conmutación de salidas.
Rango de flujo	2 × 0–15 L/min (rotámetro).
Conexión de entrada	Rápida Ohmeda / Ohio-Diamond (punto mural central).
Salidas disponibles	Directa / nebulizador / humidificador 9/16–18 (americano).
Material del cuerpo	Latón niquelado (>40) con acabado cromado.
Columna / cubierta	Polycarbonato de alto impacto (transparente).
Volantes	Aluminio anodizado (ergonómicos).
Conjunto distribuidor	Conector en “Y” de aluminio para mínima fuga.
Lectura	Vertical, por centro del flotador (L/min).
Dimensiones del producto	15 (Ancho) × 14,3 (Alto) cm — Peso: 501 gramos
Dimensiones embalaje	16 (Ancho) × 15 (Alto) × 13 (Largo) cm — Peso: 582 gramos
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE; diseñado para cumplir CGA / HCA / FDA.
Garantía	6 meses




OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO 15 L/MIN

DOBLE OXÍGENO OHMEDA

RL385

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

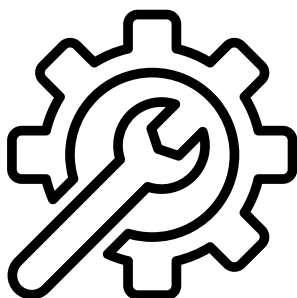

- Desconectar del punto Ohmeda y cerrar la toma antes de intervenir.
- Limpiar con paño + detergente neutro y desinfectar con agente compatible; evitar solventes/abrasivos y no autoclave.
- Inspeccionar juntas/roscas, perillas y columnas; sustituir piezas dañadas y verificar estanqueidad (p. ej., solución jabonosa).
- Almacenar seco, protegido de golpes, rayos UV y temperaturas extremas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Uso exclusivo con O_2 en tomas Ohmeda; confirmar compatibilidad antes de conectar.
- Mantener columnas verticales; no superar 15 L/min por vía ni operar fuera de condiciones normales del servicio.
- Evitar tracción del circuito; usar alivio de tensión si es necesario.
- Retirar de servicio ante fugas, daño estructural o lectura inestable; operar solo por personal capacitado.

