

OXIGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXIGENO 15 L/MIN

CONEXION OHMEDA OHIO DIAMOND

RL388

RL388 Flujómetro para oxígeno medicinal con conexión rápida Ohmeda (Ohio/Diamond), apto para tomas murales en centros de salud, ambulancias y uso domiciliario. Diseño compacto y liviano: cuerpo cromado y columna de policarbonato resistente a impactos. Cumple marcado CE y está diseñado para satisfacer CGA / HCA / FDA. Escala de 0–15 L/min; codificación verde para O₂; disponible en versiones de color ISO y USA.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Conexión rápida Ohmeda:** acople/desacople sin herramientas, con fijación firme al punto de pared.
- **Rango continuo 0–15 L/min:** ajuste progresivo y lectura directa al centro del flotador.
- **Columna tipo rotámetro de policarbonato:** alta transparencia y resistencia a impactos.
- **Cuerpo metálico cromado:** construcción robusta, compacta y liviana, fácil de limpiar.
- **Perilla moleteada** de ajuste fino con retorno fiable a 0 L/min.
- **Salida cónica universal:** conexión rápida a cánula/mascarilla o humidificador.
- **Codificación verde (O₂):** disponibles paletas ISO/USA para compatibilidad cromática.
- **Mantenimiento simple:** inspección visual de juntas/roscas y limpieza externa rutinaria.

14,3 CM



9,5 CM



OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN

CONEXIÓN OHMEDA OHIO DIAMOND

RL388

MODO DE USO

Preparación

- Verificar toma O_2 (verde) estándar Ohmeda; perilla en 0 L/min y columna íntegra.

Instalación y conexión


- Enroscar/encajar a mano el flujómetro a la toma Ohmeda y dejarlo perfectamente vertical; abrir el punto y chequear fugas breves.
- Conectar cánula/mascarilla (o humidificador) al puerto de salida.

Ajuste y lectura

- Girar la perilla lentamente hasta el caudal prescrito (0–15 L/min).
- Leer por el centro del flotador y confirmar flujo efectivo (burbujeo si usa humidificador).

Monitoreo y cierre

- Vigilar oximetría/confort y reajustar si lo indica la prescripción.
- Para terminar: volver a 0 L/min, cerrar el punto, desconectar y limpiar exterior

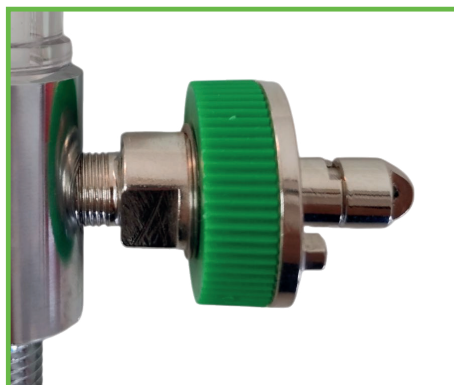

OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN

CONEXIÓN OHMEDA OHIO DIAMOND

RL388

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN CONEXIÓN OHMEDA OHIO DIAMOND
Código	RL388
Rango de flujo	0–15 L/min (lectura directa).
Presión de salida de trabajo	0,2–0,3 MPa (≈2–3 bar).
Conexión de entrada	Ohmeda / Ohio Diamond (conexión rápida).
Principio de medición	Columna tipo rotámetro (lectura vertical).
Material del cuerpo	Aleación cromada.
Columna	Polycarbonato resistente a impactos.
Color / codificación	Verde (O ₂); disponibles variantes ISO/USA.
Orientación de uso	Montaje vertical para lectura correcta.
Dimensiones del producto	9,5 (Ancho) × 14,3 (Alto) cm — Peso: 215 gramos
Dimensiones embalaje	12 (Ancho) × 16 (Alto) × 3,5 (Largo) cm — Peso: 240 gramos
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE; diseñado para cumplir CGA / HCA / FDA.
Garantía	6 meses




OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN

CONEXIÓN OHMEDA OHIO DIAMOND

RL388

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

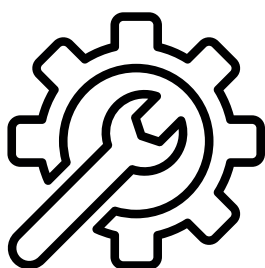

- Limpieza externa con paño + detergente neutro; evitar solventes/abrasivos.
- Inspeccionar roscas, junta y columna; retirar de servicio ante fugas o fisuras.
- Guardar seco, protegido y sin aceites/grasas en conexiones (seguridad O₂).

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Uso exclusivo en tomas O₂ compatibles Ohmeda y por personal capacitado.
- Mantener vertical para precisión; no exceder rango de flujo ni operar fuera de la presión indicada.
- Este equipo regula flujo, no presión: seguir prescripción clínica del paciente.

