

OXIGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXIGENO 15 L/MIN

CONEXION TIPO AGA

RL801

RL801 Flujómetro para oxígeno medicinal con conexión AGA para tomas murales en hospitales, ambulancias y uso domiciliario. Construcción compacta y liviana: cuerpo cromado y columna de policarbonato resistente a impactos. Cumple marcado CE y está diseñado para los lineamientos CGA / HCA / FDA. Escala de 0–15 L/min; codificación verde para O₂ (disponible paletas ISO/USA).



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Conexión AGA:** acople rápido/seguro al punto de pared compatible.
- Rango continuo** 0–15 L/min con lectura frontal en la columna (rotámetro).
- Columna de policarbonato** transparente y resistente a impactos; cuerpo cromado de alta durabilidad.
- Perilla** de ajuste fino para regulación progresiva (familia RL).
- Salida cónica** universal para conexión directa de cánula/mascarilla o a humidificador.
- Compatibilidad cromática:** versión verde (O₂); disponible en paletas ISO/USA.

14,3 CM



10,5 CM



OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN

CONEXION TIPO AGA

RL801

MODO DE USO

Preparación

- Confirmar toma O₂ (verde) estándar AGA, perilla en 0 L/min y columna íntegra y vertical.

Instalación y conexión

- Acoplar a mano el flujómetro a la toma AGA hasta tope; abrir el punto y chequear fugas.
- Conectar cánula/mascarilla (o humidificador) a la salida cónica.

Ajuste y lectura

- Girar la perilla lentamente hasta el caudal prescrito (0–15 L/min).
- Leer por el centro del flotador y mantener la columna vertical para precisión.

Monitoreo y cierre

- Vigilar oximetría/confort; reajustar si corresponde.
- Para terminar: volver a 0 L/min, cerrar el punto, desconectar y limpiar el exterior



OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN

CONEXIÓN TIPO AGA

RL801

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN CONEXIÓN TIPO AGA
Código	RL801
Rango de flujo	0–15 L/min (lectura directa en columna).
Presión de trabajo (salida)	0,2–0,3 MPa ($\approx$ 2–3 bar).
Conexión de entrada	Tipo AGA (punto mural).
Salida al paciente	Espiga cónica para cánula/mascarilla / humidificador.
Principio de medición	Columna vertical tipo rotámetro (lectura en L/min).
Material del cuerpo	Aleación cromada (acabado pulido).
Columna	Polycarbonato resistente a impactos.
Color/codificación	Verde (O ₂); disponibles variantes ISO/USA.
Orientación de uso	Montaje vertical en toma mural (precisión de lectura).
Dimensiones del producto	10,5 (Ancho) × 14,3 (Alto) cm — Peso: 210 gramos
Dimensiones embalaje	12 (Ancho) × 16 (Alto) × 3,5 (Largo) cm — Peso: 239 gramos
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE; diseñado para cumplir CGA / HCA / FDA.
Garantía	6 meses




OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN

CONEXIÓN TIPO AGA

RL801

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

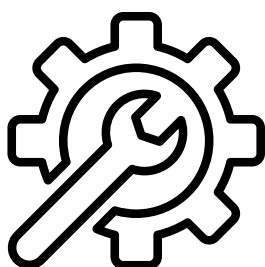

- Desconectar del punto AGA y cerrar el suministro antes de intervenir.
- Limpiar con paño + detergente neutro y desinfectar con agente aprobado; no solventes/abrasivos ni autoclave.
- Inspeccionar junta/O-ring, roscas, perilla y columna; sustituir ante desgaste/fisuras y verificar estanqueidad (solución jabonosa).
- Almacenar seco, protegido de golpes, rayos UV y temperaturas extremas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Uso exclusivo con O₂ en tomas AGA (verde); confirmar compatibilidad antes de conectar.
- Mantener vertical; no superar 15 L/min ni operar fuera de 2–3 bar; lectura al centro del flotador.
- No aplicar aceites/grasas ni usar herramientas; evitar tracción del circuito (usar alivio de tensión).
- Retirar de servicio si hay golpes/daños, fuga o columna enturbada; operación por personal capacitado.

