

OXIGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXIGENO 15 L/MIN

CONEXION TIPO UNI

RL188


RL188 Flujómetro para oxígeno medicinal con conexión UNI para tomas murales de hospitales, ambulancias y uso domiciliario. Diseño compacto y liviano: cuerpo cromado para uso intensivo y columna de policarbonato resistente a impactos. Cumple marcado CE y está diseñado para satisfacer CGA / HCA / FDA. Escala de 0–15 L/min; codificación verde para O₂ (disponible en paletas ISO/USA).



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Regulación precisa y progresiva del caudal 0–15 L/min** (lectura directa en la columna).
- **Conexión de entrada UNI:** acople seguro a la toma mural de O₂ (estándar clínico).
- **Columna tipo rotámetro de alta visibilidad;** lectura frontal a pie de cama.
- **Cuerpo cromado + policarbonato anti-impacto:** mayor durabilidad y transparencia.
- **Perilla moleteada de ajuste fino,** amigable con el uso con guantes.
- **Codificación de color verde (O₂)** y versiones en ISO/USA para compatibilidad.
- **Salida al paciente** con espiga cónica para cánula/mascarilla o humidificador.

14,3 CM

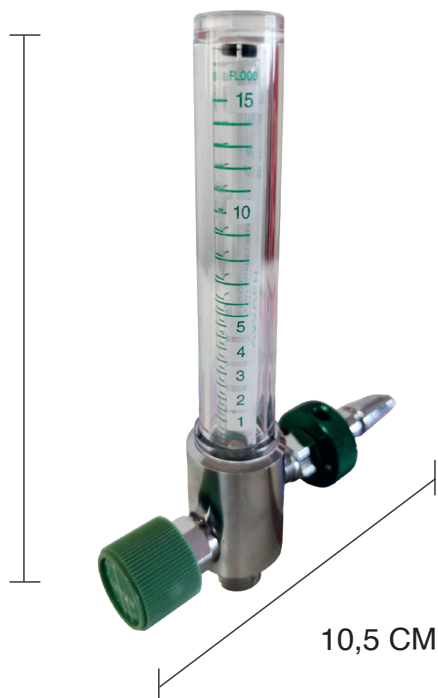

10,5 CM



OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN

CONEXIÓN TIPO UNI

RL188

MODO DE USO

Preparación

- Verifica toma O_2 (verde) estándar UNI, perilla en 0 L/min y columna íntegra/limpia.
- Si usarás humidificador, rellénalo con agua destilada hasta la marca y ciérralo.

Instalación y conexión



- Enrosca a mano el flujómetro a la toma UNI hasta tope; déjalo perfectamente vertical (no herramientas).
- Abre el punto de pared (si aplica) y realiza chequeo rápido de fugas.
- Conecta cánula/mascarilla a la salida cónica o a la salida del humidificador.

Ajuste y lectura

- Gira la perilla lentamente hasta el caudal prescrito (0–15 L/min).
- Lee la escala por el centro del flotador y confirma flujo efectivo (burbujeo si hay humidificador).
- Evita que el circuito tire del flujómetro; usa alivio de tensión si es necesario.

Monitoreo y cierre

- Controla oximetría y confort; reajusta si lo indica la prescripción.
- Tras movimientos/traslado, revisa que siga vertical y con lectura estable.
- Para terminar: vuelve a 0 L/min, cierra el punto, desconecta y limpia el exterior.

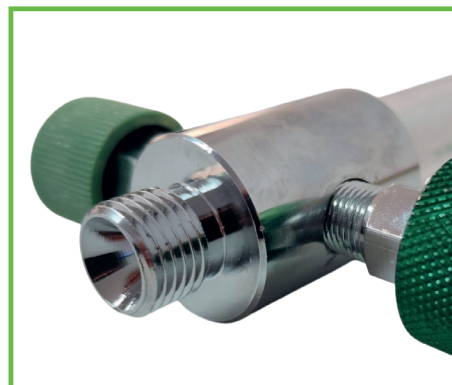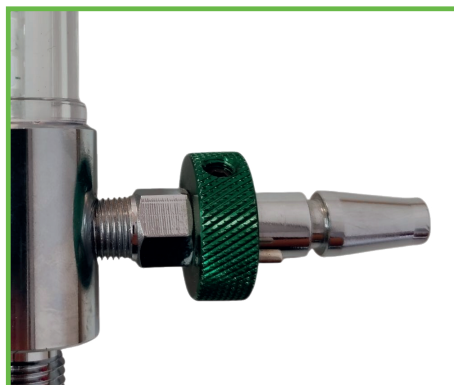

OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN

CONEXIÓN TIPO UNI

RL188

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN CONEXIÓN TIPO UNI
Código	RL188
Rango de flujo	0–15 L/min (lectura directa)
Principio de medición	Rotámetro (columna vertical con escala en L/min)
Conexión de entrada	UNI para toma mural de O ₂ (roscado metálico)
Salida al paciente	Espiga cónica para cánula/mascarilla / humidificador
Presión de trabajo (salida)	0,2–0,3 MPa (≈2–3 bar)
Material del cuerpo	Aleación cromada (resistencia superficial)
Columna	Polycarbonato resistente a impactos (alta transparencia)
Color/codificación	Verde (O ₂); disponibles paletas ISO/USA
Orientación de uso	Montaje vertical – lectura frontal
Dimensiones del producto	10,5 (Ancho) × 14,3 (Alto) cm — Peso: 201 gramos
Dimensiones embalaje	12 (Ancho) × 16 (Alto) × 3,5 (Largo) cm — Peso: 235 gramos
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE; diseñado para cumplir CGA / HCA / FDA.
Garantía	6 meses




OXÍGENO TERAPIA

FLUJOMETRO OXÍGENO 15 L/MIN

CONEXIÓN TIPO UNI

RL188

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

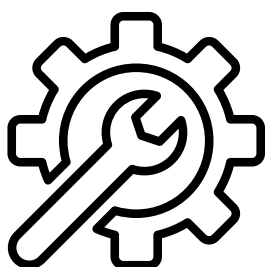

- Limpiar exterior con paño suave y detergente neutro; evitar solventes/abrasivos.
- Inspeccionar periódicamente roscas, sello y columna; reemplazar si presentan desgaste o fisuras.
- Verificar estanqueidad tras cada conexión; no usar si hay fugas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Usar exclusivamente con oxígeno medicinal y conexiones compatibles UNI.
- No exceder el rango de flujo especificado ni operar fuera de la presión de trabajo indicada.
- Mantener en posición vertical para lectura correcta de la escala; proteger de golpes y calor.
- Operación por personal capacitado; seguir protocolos del establecimiento.

