

LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO MACINTOSH

REUTILIZABLE

RLEM026


RLEM026 Laringoscopio Macintosh para intubación traqueal en pacientes adultos. Diseñado para uso de personal clínico entrenado, con mangos y hojas compatibles con LED. Permite una iluminación brillante y estable en el extremo distal de la hoja y está pensado para ciclos repetidos de limpieza, desinfección de alto nivel o esterilización por vapor según protocolo institucional.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Iluminación LED en hoja** (convencional).
- **Encendido/apagado automático** al acoplar la hoja al mango (según modelo de mango).
- **Construcción de grado médico y canales F/O sellados** en versiones integradas para facilitar la limpieza.
- **Compatible con tres formatos de mango:** medium ($\varnothing \approx 29$ mm), slim ($\varnothing \approx 20$ mm) y stubby/corto ($\varnothing \approx 33$ mm).
- **Ensamble firme por bisagra tipo Macintosh** - Hojas y mangos diseñados para procesamiento y almacenamiento seguros.
- **Observación de compatibilidad**

Este mango de laringoscopio es compatible no sólo con hojas curvas tipo Macintosh, sino también con hojas rectas Miller que utilicen el mismo acople estándar (ISO 7376/estándar verde) y correspondan al mismo sistema de iluminación (convencional o fibra óptica). Verifique tamaño y tipo antes de cada uso.

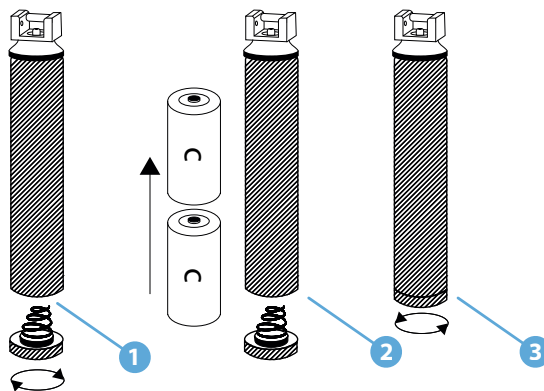

LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO MACINTOSH

REUTILIZABLE

RLEM026

CODIGO	TAMAÑO DE HOJA	LARGO TOTAL DE LA HOJA	ANCHO	
RLEM028	MAC 0	8,2 CM	0,9 CM	
RLEM029	MAC 1	9,5 CM	1,15 CM	
RLEM038	MAC 2	12 CM	1,4 CM	✓
RLEM045	MAC 3	14 CM	1,7 CM	✓
RLEM046	MAC 4	16,5 CM	1,7 CM	✓
RLEM037	MAC 5	17,4 CM	1,7 CM	

MODO DE USO:

Inspección previa

- Verifique que hoja y mango no tengan aristas ni daños.

Colocación de batería(s)

- Mango medium: 2× C.
- Mango slim: 2× AA.
- Mango stubby: 2× AA en portabaterías (respeta polaridad).

Acople hoja-mango

- Inserte en la base del mango y gire hasta oír/percibir el encastre - El LED debe encenderse de forma brillante y estable.

Uso clínico

- Proceda con la técnica de laringoscopia Macintosh habitual.

Tras el uso

- Retire baterías si el equipo quedará almacenado por periodos largos. Desmonte según el modelo y pase a limpieza / desinfección.



LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO MACINTOSH

REUTILIZABLE

RLEM026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	LARINGOSCOPIO MACINTOSH REUTILIZABLE
Código	RLEM026
Peso neto producto (aprox)	300 gramos
Dimensiones estuche	3 cm (Largo) x 24 cm (Ancho) X 22 (Alto) / Incluye estuche de transporte
Iluminación	LED en hoja (convencional)
Energía (mango)	2×C (medium) / 2×AA (slim) / 2×AA en portabaterías (stubby).
Esterilización por vapor	autoclave 132 °C a 2,25 bar por ≥4 min (desplazamiento por gravedad).
Desinfección química permitida	OPA (Cidex® OPA) o glutaraldehído 2,4 % (seguir tiempos del fabricante).
Compatibilidad RM	usar solo versiones "MR Conditional" en entorno de RM.
Procedencia	India
Marca	Scope Medical
Certificación	CE –FDA –ISO13485
Garantía	12 meses




LÍNEA EQUIPOS MEDICOS

LARINGOSCOPIO MACINTOSH

REUTILIZABLE

RLEM026

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

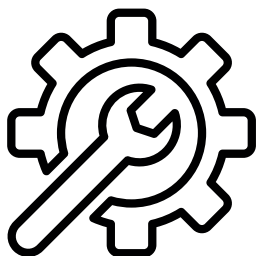

- Tras el uso, retire residuos visibles - Si corresponde, deje en solución enzimática previa.
- Limpieza manual en fregadero exclusivo (<35 °C) con detergente aprobado - Sin cepillos de alambre.
- Enjuague y seque por completo - Puede usarse lavadora-desinfectadora validada.
- Desinfección: OPA (Cidex® OPA) o glutaraldehído 2,4 % según tiempos del fabricante.
- Esterilización: autoclave 132 °C / 2,25 bar / ≥4 min; enjuague final con agua destilada/desionizada.
- Reensamble F/O (si aplica) y verificación de luz - Almacene limpio y seco.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Evite golpes, caídas y contacto con objetos punzantes.
- Deje enfriar lentamente tras autoclave; evite choques térmicos.
- Retire baterías y lámparas antes de limpiar/esterilizar - No autoclave baterías.
- No usar agentes cáusticos/oxidantes, ni ultrasonido / plasma en las hojas.
- Use baterías de calidad - No mezcle tipos ni nuevas con usadas.
- Si la luz es débil o parpadea: verifique baterías, contactos y acople hoja-mango - Si persiste, enviar a servicio técnico

