

RESCATE Y EMERGENCIA

MOCHILA RESCATE

BAGLIFE

BL108

BL108 Mochila de rescate está diseñada para el transporte organizado y seguro de insumos médicos en contextos donde la rapidez y el orden son clave. Su formato tipo mochila favorece la movilidad del usuario durante traslados operativos, manteniendo el equipamiento agrupado y disponible para una respuesta eficiente. Está recomendada para equipos de rescate, profesionales de la salud y servicios de emergencia, especialmente en escenarios donde el acceso rápido al material es crucial.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Material resistente:** confeccionada en tela Oxford ligera, durable y resistente al desgaste y la suciedad, ideal para uso operativo.
- **Organización interna eficiente:** incluye 4 separadores internos extraíbles codificados por color (amarillo, naranja, rojo y azul) para clasificar insumos de forma rápida.
- **Buena distribución del contenido:** cuenta con bolsillo principal y 4 compartimentos laterales para mantener materiales de uso frecuente más accesibles.
- **Identificación rápida:** incorpora bolsillo transparente para tarjeta/credencial, útil para reconocer el equipo en terreno.
- **Transporte cómodo:** diseño ergonómico con correas ajustables acolchadas que permiten un ajuste personalizado y reducen la presión durante traslados.
- **Diseño modular:** compatible con kits internos y organizadores, permitiendo personalizar la distribución según necesidad.



54 CM



RESCATE Y EMERGENCIA

MOCHILA RESCATE

BAGLIFE

BL108

- **Cierres más seguros:** pensados para minimizar aperturas involuntarias mientras se traslada la mochila.

MODO DE USO:

- **Verificar que la mochila** se encuentre limpia y en buen estado antes de la carga.
- **Distribuir insumos y equipamiento priorizando acceso:** elementos críticos en zonas de uso frecuente y reposición en módulos internos.
- **Utilizar los separadores internos** para clasificar por tipo de procedimiento (vía aérea, curación, medicación, insumos varios, etc.).
- **Colocar la tarjeta de identificación** en el bolsillo transparente con datos actualizados del servicio o kit.
- **Ajustar correas** hasta lograr un calce cómodo y estable para el usuario.
- **Tras cada operativo,** reponer lo utilizado y dejar la mochila nuevamente preparada para la siguiente salida.



RESCATE Y EMERGENCIA

MOCHILA RESCATE

BAGLIFE

BL108

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	MOCHILA RESCATE BAGLIFE
Código	BL108
Peso neto producto	2,25 kg
Dimensiones producto	48 cm (Alto) x 54 cm (Ancho) x 28 cm (Largo) Volumen geométrico ≈ 52,8 L L útiles
Material	Tela Oxford ligera, altamente duradera y resistente al desgaste y la suciedad.
Color / visibilidad	Rojo + reflectantes.
Organización integrada	4 separadores internos extraíbles (amarillo, naranja, rojo y azul) para organización/clasificación.
Bolsillería externa	Bolsillo principal + 4 compartimentos laterales; incluye bolsillo transparente porta identificación.
Cierres / herrajes	Cierre en bolsillos principales para minimizar aperturas involuntarias
Base	Fondo reforzado con estructura semirrígida para mayor estabilidad.
Sistema de transporte	Diseño ergonómico, asa reforzada y correas ajustables acolchadas para ajuste personalizado y mayor confort.
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife / BagLife
Certificación	CE – ISO13485
Garantía	12 meses




RESCATE Y EMERGENCIA

MOCHILA RESCATE

BAGLIFE

BL108

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

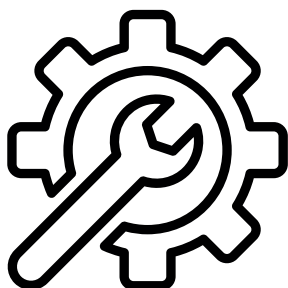

- Limpiar la superficie externa con paño húmedo y detergente neutro, retirando polvo y suciedad acumulada.
- Dejar secar completamente a la sombra antes de guardar, evitando exposición a fuentes directas de calor.
- Ventilar el interior después de cada jornada, especialmente si se trabajó en ambientes húmedos o con derrames.
- Revisar periódicamente cierres, costuras, tiradores y correas para detectar desgaste y gestionar reparación o reemplazo oportuno.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Mantener una organización interna constante (según protocolo del servicio) para reducir tiempos de búsqueda durante la atención.
- Ajustar correctamente las correas antes del traslado para asegurar una distribución adecuada del peso.
- No sobrecargar la mochila para evitar tensiones excesivas en cierres y correas.
- Sustituir la mochila si se identifican daños estructurales que comprometan la seguridad del contenido o del usuario.

