

OXÍGENO TERAPIA

REGULADOR COMPACTO

YUGO (LARGO)

RL243

RL243 Regulador portátil para cilindros de oxígeno con conexión tipo yugo CGA-870, diseñado para uso clínico y prehospitalario. Su construcción liviana y robusta facilita el traslado, mientras que el manómetro frontal protegido permite visualizar la presión del cilindro de un vistazo. La salida DISS entrega oxígeno a dispositivos compatibles (humedificador, flujómetro o, mediante niple, mascarilla/naricera) con selección precisa de caudal.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Montaje rápido y seguro:** yugo Pin-Index CGA-870 con tornillo en "T" y asiento sellante para un acople firme.
- **Cuerpo liviano y durable:** aluminio anodizado; componentes internos metálicos para estabilidad y vida útil.
- **Indicación clara:** manómetro integrado de lectura alta y zona de recarga marcada.
- **Entrega versátil:** puerto DISS O₂ para accesorios o administración directa mediante niple plástico.
- **Control de caudal por dial inferior** (selector moletado) para ajustes finos según terapia.
- **Formato "largo"** que deja libre el frente del cilindro y mejora la manipulación en terreno.



8 CM



18,2 CM



OXÍGENO TERAPIA

REGULADOR COMPACTO

YUGO (LARGO)

RL243

MODO DE USO

- **Verifique que el cilindro sea O₂ CGA-870** y que el regulador tenga su arandela “washer” en buen estado.
- **Alinee los pines del yugo** con las perforaciones de la válvula del cilindro y apriete el tornillo en “T” hasta asegurar el sello (sin herramientas).
- **Cierre el dial de caudal en 0.** Abra lentamente la válvula del cilindro; confirme presión en el manómetro.
- **Conecte el DISS al accesorio:** vaso humidificador/flujo continuo o niple plástico para mascarilla/naricera.
- **Seleccione el caudal deseado con el dial.** Verifique que no existan fugas (escucha/espuma detectora).
- **Al finalizar,** cierre la válvula del cilindro, sangre la línea dejando el dial abierto hasta que el manómetro marque 0, vuelva el dial a 0 y retire el regulador aflojando el tornillo en “T”.



OXIGENO TERAPIA

REGULADOR COMPACTO

YUGO (LARGO)

RL243

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	REGULADOR COMPACTO YUGO (Largo)
Código	RL243
Tipo de conexión al cilindro	Yugo CGA-870 (Pin-Index)
Salida de oxígeno	DISS O ₂ lateral (compatible con humidificador/ otros accesorios)
Rango de flujo	0-15 L/min
Pasos de selección	0 - 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 15 L/min
Manómetro	0-3000 psi, zona de recarga señalizada
Material del cuerpo	Aluminio anodizado (verde)
Compatibilidad	Cilindros O ₂ tipo E u otros con válvula CGA-870; accesorios con rosca DISS O ₂
Dimensiones del producto	8 (Ancho) × 18,2 (Alto) cm — Peso: 419 gramos
Dimensiones embalaje	19,7 (Ancho) × 6 (Alto) × 7 (Largo) cm — Peso: 452 gramos
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 meses




OXÍGENO TERAPIA

REGULADOR COMPACTO

YUGO (LARGO)

RL243

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

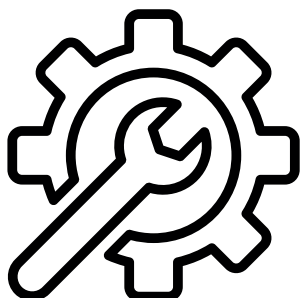

- Limpie el exterior con paño suave ligeramente humedecido; no use solventes ni aceites/grasas.
- Inspeccione periódicamente O-ring/washer del yugo, roscas DISS y dial; reemplace sellos dañados.
- Realice prueba de fuga tras cada montaje o mantención.
- No esterilizar por calor; almacenaje en lugar seco, sin polvo y lejos de fuentes de calor.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Sólo para oxígeno medicinal. No usar con otros gases.
- Evite golpes, caída o torsión del tornillo en "T" y del manómetro.
- Mantenga el dial en 0 al montar/desmontar; abra el cilindro siempre de forma gradual.
- Transporte con el cilindro asegurado; no exponga a sustancias oleosas (riesgo de combustión con O_2).

