

OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO E – PIN INDEX

(OXÍGENO)

RL207

RL207 El Cilindro de Oxígeno Tipo E con conexión Pin Index es una solución pensada para oxigenoterapia en entornos domiciliarios, clínicos y prehospitalarios, donde se necesita un suministro confiable y un manejo práctico. Su diseño favorece el transporte y la operación segura, siendo ideal para servicios de emergencia, ambulancias y usuarios que requieren soporte de oxígeno en distintos contextos.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Conexión Pin Index (tipo yugo):** acople guiado por pines para una instalación correcta con reguladores compatibles.
- **Compatibilidad con reguladores tipo yugo:** pensado para reguladores Pin Index, facilitando uso en distintos servicios y recambios.
- **Construcción liviana y resistente:** estructura preparada para uso clínico y prehospitalario, con buena durabilidad.
- **Portabilidad práctica:** formato cómodo para transporte en carro, bolso o sistemas de ambulancia.
- **Manejo simple y controlado:** válvula de operación manual para apertura/cierre seguro durante el uso.
- **Acople estable y confiable:** diseño orientado a un ajuste firme con yugo cuando se instala correctamente.
- **Identificación y trazabilidad:** marcado del cilindro para control interno y rápida identificación del gas.
- **Uso versátil:** apto para domicilio, ambulancias, emergencia y rescate, y centros clínicos.
- **Enfoque en seguridad:** diseñado para operar con oxígeno y accesorios compatibles, siguiendo buenas prácticas de manejo.



OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO E – PIN INDEX

(OXÍGENO)

RL207

MODO DE USO

- **Verificar** que el cilindro esté en buen estado, limpio y con rotulación legible.
- **Confirmar** que el regulador sea compatible con conexión Pin Index (tipo yugo).
- **Alinear y acoplar** el regulador siguiendo el procedimiento del fabricante del regulador.
- **Abrir el suministro** de forma gradual y comprobar ausencia de fugas.
- **Abrir el suministro** de forma gradual y comprobar ausencia de fugas.
- **Ajustar el flujo** según indicación clínica y monitorear el suministro durante el uso.
- **Al finalizar**, cerrar el cilindro, liberar presión del sistema y retirar el regulador con cuidado.



OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO E – PIN INDEX

(OXÍGENO)

RL207

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CILINDRO TIPO E – PIN INDEX (OXÍGENO)
Código	RL207
Gas	Oxígeno (O ₂)
Capacidad	0.679 m ³ / 679 L
Presión de servicio	2015 psi (marcado DOT-3AL 2015)
Material	Aleación de aluminio 6061-T6
Peso (vacío)	3,85 kg
Dimensiones	Alto 74 cm / Diámetro 13 cm
Válvula / Conexión:	Tipo Pin Index (para regulador yugo)
Acabado/Color:	Cúpula blanca y cuerpo aluminio (acabado metálico)
Identificación del gas	Oxígeno (O ₂), marcado en el cilindro
Procedencia	EE.UU.
Marca	RescateLife
Certificación	CE - DOT (EE.UU.)
Garantía	12 meses

* No incluye carga. Indicar en la cotización si se requiere el cilindro con carga.




OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO E – PIN INDEX

(OXÍGENO)

RL207

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

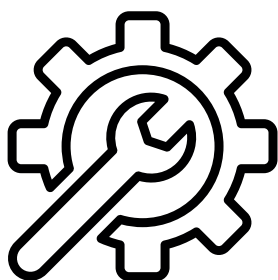

- Limpiar exterior con paño suave ligeramente humedecido.
- No usar solventes, aceites, grasas ni productos abrasivos.
- Mantener la válvula y conexiones libres de polvo/suciedad.
- Realizar revisiones periódicas según protocolo interno y normativa aplicable.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Almacenar en posición segura, evitando caídas y golpes.
- Mantener lejos de fuentes de calor, chispas o llamas.
- Transportar asegurado (carro/soporte) para prevenir volcamiento.
- No manipular conexiones con manos con grasa/aceite.
- Usar únicamente con accesorios y reguladores compatibles.

