

RESCATE Y EMERGENCIA

CAMILLA SCOOP AMARILLA

RL306


RL306 Camilla espátula tipo scoop diseñada para la transferencia sin volteo, minimizando la movilización axial en pacientes con trauma, caídas o sospecha de lesión vertebral. Su sistema de apertura longitudinal permite separar las mitades, deslizarlas bajo el paciente y bloquear en segundos, reduciendo tiempos y esfuerzo del equipo. La estructura combina paneles poliméricos de alta resistencia con rieles telescópicos de aluminio, lo que entrega rigidez, bajo peso y bordes suaves para un manejo seguro. Incluye correas de sujeción de liberación rápida y es compatible con inmovilizadores de cabeza y collares cervicales, convirtiéndola en una solución estándar para ambulancias, urgencias y rescate en terreno

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Apertura y cierre bipartido** con doble seguro en ambos extremos para bloqueo/desbloqueo suave.
- **Ajuste de longitud con 5 posiciones** mediante pulsadores laterales.
- **Cavidad cefálica** para favorecer la alineación cervical durante el traslado.
- **Radiotransparente:** compatible con Rayos X sin retirar al paciente de la camilla.
- **Superficie polimérica continua:** lavable, impermeable y de bajo mantenimiento.
- **Asas y ranuras perimetrales** para agarre y fijación de correas.
- **Incluye: 3 correas de sujeción** con hebilla de liberación rápida "PRESS".



33 CM (CABECERA) · 45,5 CM (CUERPO)

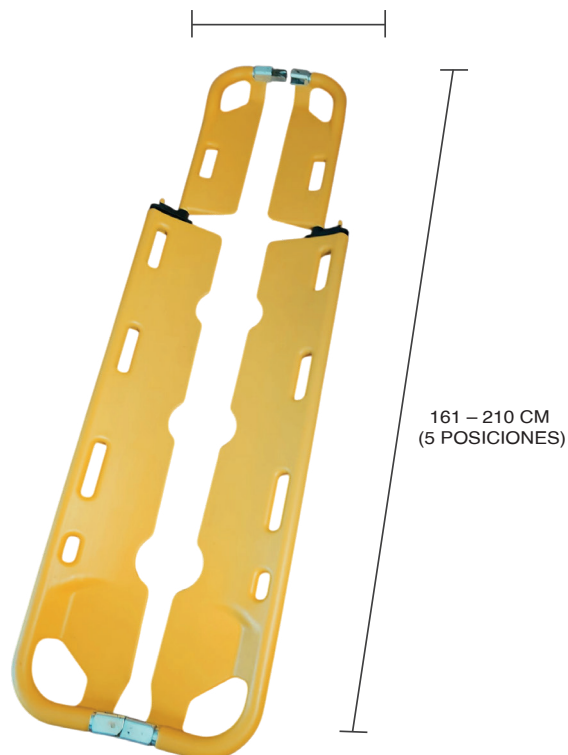

RESCATE Y EMERGENCIA

CAMILLA SCOOP AMARILLA

RL306

MODO DE USO:

- **Desbloquear** los cierres y separar ambas mitades.
- **Seleccionar longitud** adecuada según talla.
- **Deslizar** cada mitad por debajo del paciente desde ambos lados manteniendo control cervical.
- **Cerrar primero** en cabeza y luego en pies hasta oír el “click”.
- **Colocar tres correas** (tórax–pelvis–piernas) y verificar tensión.
- **Levantar en conjunto** y transferir a camilla/ambulancia según protocolo.



RESCATE Y EMERGENCIA

CAMILLA SCOOP AMARILLA

RL306

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CAMILLA SCOOP AMARILLA
Código	RL306
Rango de longitud	161 – 210 cm (5 posiciones)
dimensiones	Ancho útil 33 cm (cabecera) / 45,5 cm (cuerpo) - Espesor del panel 4 cm
Peso del producto	9,15 kg
Capacidad de carga	159 kg (estática/operativa)
Material de paneles	Polímero de alta resistencia, impermeable, superficie lisa de fácil sanitización
Guías telescópicas	Aluminio con pulsadores laterales (selección de posición)
Cierres	Doble pestillo (cabeza y pies), accionamiento manual con cierre audible
Radiolucidez	Sí, apta para Rayos X sin retirar al paciente
Puntos de agarre/sujeción	Asas y ranuras perimetrales para manipulación y paso de correas (multiformato)
Acabado	Bordes redondeados, perfil bajo para deslizamiento
Color	Amarillo (alta visibilidad)
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 meses




RESCATE Y EMERGENCIA

CAMILLA SCOOP AMARILLA

RL306

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

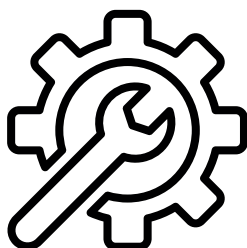

- Lavar tras cada uso con agua tibia y detergente neutro; enjuagar y secar.
- Desinfectar con amonio cuaternario o alcohol $\leq 70\%$ (evitar cloro concentrado).
- Revisar cierres y pulsadores; sustituir piezas dañadas.
- Guardar seca y plana, sin peso encima.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Confirmar bloqueos antes de levantar.
- No usar para izado vertical ni arrastre prolongado.
- Utilizar siempre las 3 correas y control cervical cuando corresponda.
- Evitar exposición prolongada a sol/UV o calor.

