

RESCATE Y EMERGENCIA

KIT DE FERULAS SEMIRRÍGIDAS

PEDIÁTRICAS

RL318

RL318 El Kit de Férulas Semirrígidas Pediátricas

es un set reutilizable diseñado para la inmovilización rápida y segura de extremidades en pacientes pediátricos, ideal en atención prehospitalaria y situaciones de rescate. Incluye 5 piezas para cubrir distintas zonas, permitiendo estabilizar lesiones y reducir el movimiento durante el traslado. Fabricadas en poliuretano y de superficie no absorbente, son durables, fáciles de limpiar y además radiotransparentes, facilitando la evaluación clínica sin necesidad de retirar la férula.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Kit pediátrico completo (5 piezas + bolso):** incluye férulas para pierna larga, pierna corta, brazo y 2 de muñeca, cubriendo diferentes zonas de inmovilización en extremidades.
- Soporte semirrígido y reutilizable:** aporta estabilidad para reducir movimiento del segmento lesionado durante atención y traslado, con sujeción rápida y firme mediante velcro.
- Materiales resistentes para uso prehospitalario:** cuerpo en poliuretano con recubrimiento de lona PVC reforzada con poliéster, impermeable y durable, ideal para uso frecuente y fácil de limpiar/desinfectar.
- Versatilidad clínica:** piezas de uso bilateral (derecha/izquierda), diseño ergonómico y no absorbente que favorece higiene y confort; además es radiotransparente, facilitando evaluación por imagen según protocolo.
- Ligero y transportable:** kit de peso reducido, con bolso para traslado ordenado en ambulancias, rescate en montaña/acuático y servicios de urgencia.



RESCATE Y EMERGENCIA

KIT DE FERULAS SEMIRRÍGIDAS

PEDIÁTRICAS

RL318



PIERNA LARGA

18,5–27,5 (ANCHO) × 52 (ALTO) CM



PIERNA CORTA

19,3–24,2 (ANCHO) × 38 (ALTO) CM



MUÑECA

17 (ANCHO) × 24,5 (ALTO) CM



BRAZO

14-19 (ANCHO) × 30,5 (ALTO) CM



RESCATE Y EMERGENCIA

KIT DE FERULAS SEMIRRÍGIDAS

PEDIÁTRICAS

RL318

MODO DE USO:

- **Evaluación inicial:** valorar lesión, controlar hemorragias si corresponde y verificar perfusión distal (color, temperatura, sensibilidad).
- **Seleccionar la férula adecuada** según zona (pierna larga/corta, brazo, muñeca) y tamaño del paciente.
- **Preparación:** abrir correas/velcros y posicionar la férula lista para aplicar sin mover en exceso la extremidad.
- **Colocación:** ubicar la férula alineada al segmento a inmovilizar, manteniendo la extremidad en posición funcional según protocolo clínico.
- **Fijación:** ajustar velcros de forma progresiva, logrando sujeción firme pero confortable (sin comprometer circulación).
- **Verificación:** reevaluar perfusión distal y estabilidad de la inmovilización; reajustar si es necesario.
- **Traslado:** mantener monitorización y volver a revisar fijaciones durante el movimiento.
- **Si se requiere imagen RX,** la propiedad radiotransparente puede facilitar evaluación sin retirar (según criterio clínico y protocolo).



RESCATE Y EMERGENCIA

KIT DE FERULAS SEMIRRÍGIDAS

PEDIÁTRICAS

RL318

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	KIT DE FÉRULAS SEMIRRÍGIDAS PEDIÁTRICAS (5 PIEZAS) + BOLSO
Código	RL318
Material (cuerpo férulas)	Poliuretano
Tela de cobertura	Lona PVC con refuerzo de tejido entramado de poliéster (alta tenacidad); resistente a tracción/abrasión/desgarro; impermeable 100%
Sistema de sujeción	Velcro
Propiedad RX	Traslúcida a radiografías (radiotransparente)
Reutilizable / limpieza	Reutilizable; durable y fácil de limpiar
Contenido del kit (5 piezas)	1 pierna larga + 1 pierna corta + 1 brazo + 2 muñeca + bolso
Dimensiones del bolso	28 (alto) × 38 (ancho) × 10 (largo) cm
Peso del kit con bolso	895 gramos
Dimensiones piezas	Pierna larga: 18,5–27,5 (ancho angosto–ancho mayor) × 52 (alto) cm / Pierna corta: 19,3–24,2 (ancho angosto–ancho mayor) × 38 cm / Brazo: 14–19 (ancho angosto–ancho mayor) × 30,5 cm / Muñeca: 17 (ancho) × 24,5 (alto) cm
Procedencia	fabricación nacional
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 meses




RESCATE Y EMERGENCIA

KIT DE FERULAS SEMIRRÍGIDAS

PEDIÁTRICAS

RL318

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

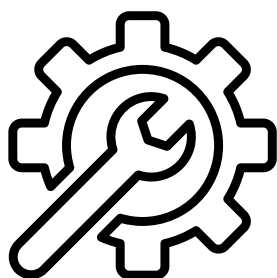

- Limpiar con paño suave y detergente neutro después de cada uso.
- Desinfectar con productos compatibles (según protocolo del servicio).
- Secar completamente antes de guardar, cuidando que los velcros queden libres de residuos para mantener adherencia.
- Inspeccionar costuras, cobertura y velcros; retirar de servicio si hay cortes, desgaste o pérdida de sujeción.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Uso recomendado por personal capacitado y bajo protocolos institucionales.
- Evitar exposición prolongada a sol directo/calor extremo para prolongar vida útil de la cobertura.
- Almacenar el kit seco y ordenado dentro del bolso para conservar forma y adhesión de velcros.

