

RESCATE Y EMERGENCIA

INMOVILIZADOR DE CABEZA

ADULTO


RL319

RL319 El Inmovilizador de Cabeza Adulto está diseñado para estabilizar la cabeza y apoyar la inmovilización cervical en pacientes adultos durante la atención y el traslado. Se utiliza como complemento sobre tabla espinal, ayudando a mantener la alineación en posición neutra y a disminuir movimientos laterales o rotacionales que podrían agravar una lesión. Es ideal para uso prehospitalario, rescate y emergencias, especialmente en casos de trauma como caídas, accidentes de tránsito o lesiones deportivas, donde se requiere un control seguro y rápido del paciente.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Material clínico lavable y no absorbente:** fabricado en poliuretano color naranja internacional, lavable y no absorbe sangre ni fluidos corporales.
- Diseño modular de contención lateral:** incluye base + 2 cojines laterales para mantener la cabeza centrada y estable.
- Perforaciones a la altura de los oídos:** facilitan un monitoreo más simple durante la atención.
- Fijación segura a tabla espinal:** base con velcro y correas para fijación a la tabla, más correas ajustables con velcro de alta resistencia.
- Uso y compatibilidad:** laterales para tabla de rescate / tabla espinal (uso adulto).

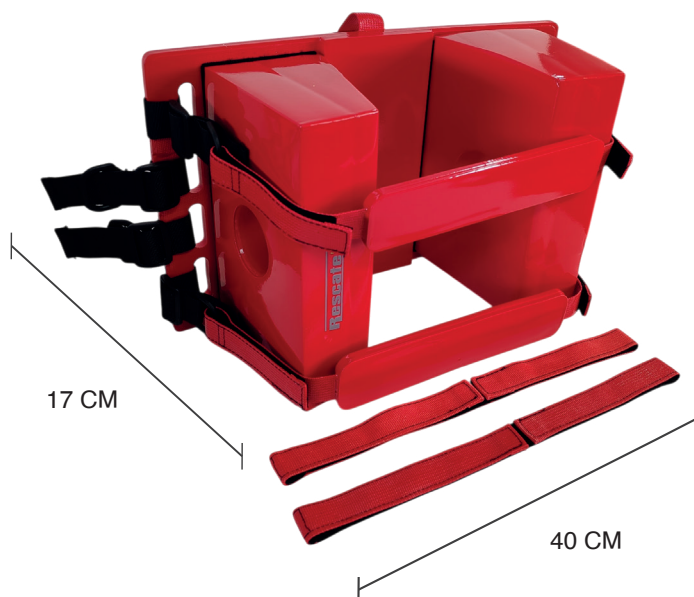

RESCATE Y EMERGENCIA

INMOVILIZADOR DE CABEZA

ADULTO

RL319

MODO DE USO:

- **Inspección previa:** revisar base, cojines, velcros y correas; confirmar que estén limpios e íntegros.
- **Preparación del paciente:** con el paciente ya posicionado en tabla espinal según protocolo, alinear cabeza y cuello en posición neutra.
- **Instalación:** ubicar la base y posicionar los cojines laterales a ambos lados de la cabeza, evitando puntos de presión.
- **Ajuste y fijación:** asegurar con correas/velcros, fijando el sistema a la tabla y ajustando lo necesario para que quede estable.
- **Verificación final:** confirmar estabilidad y confort; reevaluar sujeción durante el traslado si el procedimiento lo requiere.



RESCATE Y EMERGENCIA

INMOVILIZADOR DE CABEZA

ADULTO

RL319

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	INMOVILIZADOR DE CABEZA ADULTO
Código	RL319
Aplicación / Compatibilidad	Laterales para tabla de rescate / tabla espinal (uso adulto)
Material	Poliuretano
Propiedades del material	Lavable y no absorbe sangre ni fluidos corporales
Componentes del sistema	Base + 2 cojines laterales + correas
Diseño de cojines	Cojines laterales perforados a la altura de los oídos
Sistema de sujeción	Base con velcro y correas + correas ajustables con velcro de alta resistencia
Peso	411 gramos
Dimensiones	Ancho 40 cm × Alto 25,5 cm × Largo 17 cm
Peso	902 gramos
Presentación	1 set (inmovilizador completo: base + cojines + correas)
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 meses




RESCATE Y EMERGENCIA

INMOVILIZADOR DE CABEZA

ADULTO

RL319

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

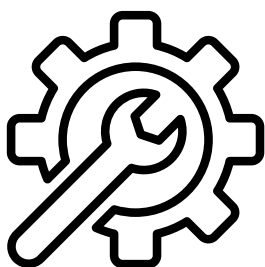

- Limpiar posterior a cada uso con paño suave y detergente neutro.
- Desinfectar con solución compatible con poliuretano (evitar abrasivos o solventes fuertes).
- Secar completamente antes de almacenar, cuidando especialmente el área de velcros para conservar adherencia.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Guardar en lugar limpio y seco, protegido de sol directo y temperaturas extremas.
- No ajustar con presión excesiva: la sujeción debe ser segura y confortable, evitando puntos de compresión.
- Retirar de servicio si el poliuretano se deforma, hay roturas o si el velcro pierde adherencia.

