

RESCATE Y EMERGENCIA

INMOVILIZADOR DE CABEZA


PEDIÁTRICO

RL320

RL320 El inmovilizador de cabeza pediátrico es un accesorio de inmovilización diseñado para entregar soporte y estabilización a la zona craneocervical en pacientes pediátricos, ayudando a minimizar desplazamientos de la cabeza durante el manejo y el traslado cuando existe sospecha de lesión. Su función es complementar la inmovilización general del paciente, aportando contención lateral y fijación mediante correas al sistema de traslado (tabla espinal), con el objetivo de reducir el riesgo de agravar una lesión por movimiento no controlado.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Material clínico lavable y no absorbente:** fabricado en poliuretano, apto para limpieza y desinfección; no absorbe sangre ni fluidos corporales.
- **Diseño modular para contención lateral:** incorpora dos cojines laterales diseñados para mantener la cabeza centrada y estable.
- **Perforaciones a la altura de los oídos:** permiten un monitoreo más simple durante la atención.
- **Fijación segura mediante velcro y correas:** base con velcro y correas para fijación a la tabla espinal; además incluye correas ajustables con velcro de alta resistencia.

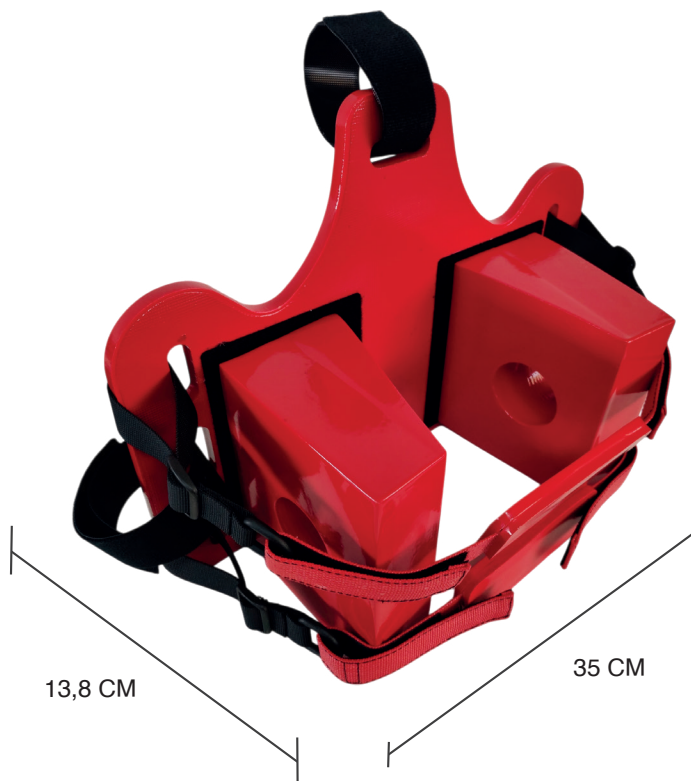

RESCATE Y EMERGENCIA

INMOVILIZADOR DE CABEZA

PEDIÁTRICO

RL320

MODO DE USO:

- **Inspección previa:** verificar que la base, cojines, velcros y correas estén íntegros y limpios, sin desgaste que afecte la adherencia.
- **Preparación del paciente:** con el paciente ya posicionado en tabla espinal según protocolo, alinear cabeza y cuello en posición neutra.
- **Instalación del inmovilizador:** ubicar la base y posicionar los cojines laterales a ambos lados de la cabeza, evitando puntos de presión.
- **Ajuste y fijación:** asegurar el sistema con las correas/velcros, fijándolo a la tabla espinal y ajustando lo necesario para que quede estable.
- **Verificación final:** confirmar estabilidad del conjunto y confort del paciente; reevaluar sujeción durante el traslado si el procedimiento lo requiere.



RESCATE Y EMERGENCIA

INMOVILIZADOR DE CABEZA

PEDIÁTRICO

RL320

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	INMOVILIZADOR DE CABEZA PEDIÁTRICO
Código	RL320
Aplicación / Compatibilidad	Laterales para tabla de rescate / tabla espinal
Material	Poliuretano
Propiedades del material	Lavable y no absorbe sangre ni fluidos corporales
Componentes del sistema	Base con velcro + correas para fijación a tabla + 2 cojines laterales
Diseño de cojines	Cojines laterales perforados a la altura de los oídos
Sistema de sujeción	Correas ajustables con velcro de alta resistencia
Peso	411 gramos
Dimensiones	Ancho 35 cm × Alto 27 cm × Largo 13,8 cm
Peso	411 gramos
Presentación	1 set (inmovilizador completo: base + cojines + correas)
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 meses




RESCATE Y EMERGENCIA

INMOVILIZADOR DE CABEZA

PEDIÁTRICO

RL320

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

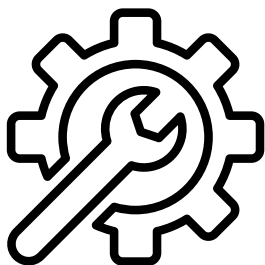

- Limpiar posterior a cada uso con paño suave y detergente neutro.
- Desinfectar con solución compatible con poliuretano (evitar productos abrasivos o solventes fuertes).
- Secar completamente antes de almacenar, cuidando especialmente el área de velcros para conservar adherencia.
- Guardar en lugar limpio y seco, protegido de sol directo y temperaturas extremas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- No ajustar con presión excesiva: la sujeción debe ser segura y confortable, evitando puntos de compresión.
- Retirar de servicio si el poliuretano se deforma, si hay roturas o si el velcro pierde adherencia.
- Retirar de servicio si el poliuretano se deforma, si hay roturas o si el velcro pierde adherencia.

