

RESCATE Y EMERGENCIA

CAMILLAS SCOOP VERDE

RL346


RL346 Camilla tipo scoop (espátula) para traslado con mínima movilización del paciente. Permite separar en dos mitades, deslizar cada ala por debajo del cuerpo y cerrar en cabeza y pies, manteniendo alineación. Superficie cóncava y bordes redondeados para confort; asas perimetrales para agarre múltiple. Radiolúcida, impermeable y compatible con inmovilizador de cabeza y correas de sujeción (opcionales).

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Apertura/cierre** en ambos extremos con pestillos metálicos de acción rápida y seguro visible.
- **Geometría cóncava y bordes redondeados** para estabilidad y confort en el apoyo.
- **HDPE de alta resistencia:** no poroso, fácil de desinfectar y apto para uso intensivo.
- **Herrajes en aluminio/acero inoxidable:** durables y anticorrosivos.
- **Canal central que reduce peso**, favorece el drenaje y la inspección.
- **Múltiples asas perimetrales** que admiten guantes voluminosos y diferentes posiciones de agarre.
- **Compatibilidad con inmovilizadores de cabeza y correas de sujeción** (3 puntos, tipo clip o mosquetón).
- **Color de alta visibilidad (verde)** para identificación rápida en rescate y triage.
- **Perfil cefálico** con transición suave para apoyar región occipital sin presionar.
- **Construcción rígida** con baja flexión en cargas dentro del rango especificado.



43 CM

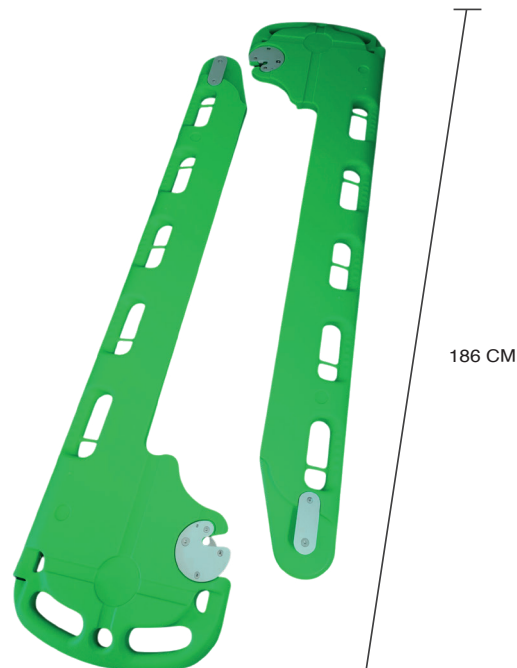

186 CM



RESCATE Y EMERGENCIA

CAMILLAS SCOOP VERDE

RL346

MODO DE USO:

- **Preparar la escena y evaluar al paciente;** coordinar maniobra con el equipo.
- **Separar las mitades liberando** los pestillos en cabeza y pies; ubícalas paralelas al paciente.
- **Deslizar cada ala por debajo del cuerpo** desde hombros y caderas, manteniendo alineación.
- **Acoplar extremos** hasta escuchar/confirmar el clic de bloqueo en ambos lados.
- **Fijar con correas** (tórax, pelvis, piernas) y verificar que no haya pellizcamientos.
- **Trasladar con agarre en asas** y depositar sobre camilla principal o tablero según protocolo.



RESCATE Y EMERGENCIA

CAMILLAS SCOOP VERDE

RL346

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CAMILLAS SCOOP VERDE
Código	RL346
Dimensiones externas	186 cm (largo) × 43 cm (ancho) × 4 cm (espesor)
Peso del producto	7,75 kg
Capacidad de carga	hasta 250 kg (uso estático/traslado asistido)
Material del cuerpo	HDPE (polietileno de alta densidad), superficie microtexturada
Cierres y bisagras	Placas y pestillos aluminio/acero inoxidable en cabeza y pies
Mecanismo de bloqueo	Pestillo de embrague con señal táctil/visual de cierre
Radiolucidez	Compatible con rayos X (no requiere transferencia previa)
Radiolucidez	Sí, apta para Rayos X sin retirar al paciente
Asas	Múltiples aperturas perimetrales para porte a varias manos
Longitud	Fija (no telescópica)
Compatibilidad de accesorios	Inmovilizador de cabeza y correas universales (no incluidas)
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 meses




RESCATE Y EMERGENCIA

CAMILLAS SCOOP VERDE

RL346

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

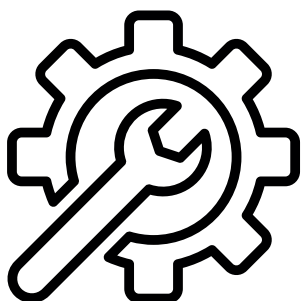

- Revisión post-uso: fisuras del HDPE, juego en bisagras/pestillos y estado de los pernos.
- Lavado y desinfección: agua + detergente neutro; luego desinfectar con solución compatible y secar completamente.
- Herrajes: si hay dureza, aplicar lubricante seco en ejes (sin excederse ni contaminar la superficie).
- Almacenaje: horizontal, sin carga encima y protegido de calor/UV directos.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- No utilizar si los pestillos no bloquean al 100% o hay daño visible.
- Evitar impactos contra cantos duros que puedan astillar o deformar el polímero.
- Confirmar cierre en cabeza y pies antes de levantar al paciente.
- Operación por personal capacitado en inmovilización y traslado con scoop.

