

EQUIPOS MEDICOS

ELECTRODO PINZA PEDIATRICO

PARA ELECTROCARDIOGRAFO

RLEM2019

RLEM2019 Juego de pinzas para registro de electrocardiograma en pacientes pediátricos. Su diseño compacto con resorte permite una sujeción firme en extremidades pequeñas y facilita un contacto estable para obtener trazados de calidad. Ideales para exámenes de reposo y uso rutinario en consulta o hospital.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Conexión dual al cable:** banana Ø4 mm o broche snap.
- **Mordaza con resorte y superficie de contacto** ampliada para minimizar artefactos.
- **Cuerpo ligero y contactos metálicos** durables para limpieza frecuente.
- **Set organizado para extremidades** (RA, LA, RL, LL).

MODO DE USO

- **Verifica** integridad de pinzas y cables.
- **Conecta el terminal del cable** (banana 4 mm o snap).
- **Aplica una fina capa de gel** conductor en el punto de contacto.
- **Coloca cada pinza** en la extremidad indicada evitando piel lesionada.
- **Asegura la presión justa** y confirma en el monitor la calidad de la señal.
- **Retira y limpia** antes de guardar.



EQUIPOS MEDICOS

ELECTRODO PINZA PEDIATRICO

PARA ELECTROCARDIOGRAFO

RLEM2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	ELECTRODO PINZA PEDIATRICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO
Código	RLEM2019
Tipo	Pinzas de extremidad para ECG de reposo
Población	Pediátrica
Contenido	Set de 4 pinzas (RA, LA, RL, LL)
Conexión al cable	Banana Ø4 mm con tornillo / Snap
Compatibilidad	Monitores y cables de ECG estándar (3–12 derivaciones) con terminal banana 4 mm o snap
Material – cuerpo	Polímero de ingeniería
Material – contacto	Metal pulido
Condición	Reutilizable, no estéril
Dimensión por pinza	2,5 cm (Largo) x 9,2 cm (Alto) x 2,3 cm (Ancho)
Peso del set	124 gramos
Color	Verde agua
Procedencia	Importación directa
Marca	General Meditech
Certificación	CE
Garantía	3 meses




EQUIPOS MEDICOS

ELECTRODO PINZA PEDIATRICO

PARA ELECTROCARDIOGRAFO

RLEM2019

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

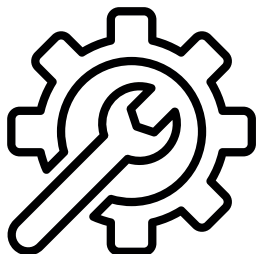

- Limpia con paño suave y detergente neutro; desinfecta con alcohol isopropílico al 70 % o amonios cuaternarios.
- No sumerjas ni permitas ingreso de líquidos al mecanismo del resorte.
- Seca completamente y guarda en estuche o bandeja seca.
- Revisa y ajusta periódicamente tornillo y tuerca de los terminales.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Usa siempre gel conductor para optimizar la señal.
- Evita zonas con cremas, heridas o apósitos.
- Retira antes de desfibrilación.
- Sustituye la pinza si presenta fisuras, pérdida de presión o corrosión.
- Almacena entre 10–30 °C, lejos de humedad y luz directa.

