

MUEBLES CLÍNICOS

NEGATOSCOPIO

SIMPLE LED

RLPROD552

RLPROD552 Negatoscopio Simple LED está diseñado para hacer clara cualquier radiografía al primer vistazo. Su iluminación uniforme permite diagnósticos más precisos y rápidos en consultas, box de urgencia, pabellones, odontología y veterinaria. Resuelve los clásicos problemas de placas mal iluminadas, fatiga visual y pérdida de tiempo al ajustar la imagen, ofreciendo una superficie estable y luminosa lista para trabajar todo el día.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Luz LED** homogénea que mejora la visibilidad de la placa y ayuda a evitar interpretaciones erróneas.
- **Difusor opal de metacrilato** (3 mm) para distribución uniforme y lectura sin reflejos.
- **Chasis de aleación de aluminio:** liviano, estable y resistente para el uso diario.
- **Instalación versátil:** apto para mural o sobremesa (orificios tipo keyhole en la trasera).
- **Protección eléctrica** por fusible para el sistema de iluminación.
- **Operación** simple mediante interruptor ON/OFF y cordón 220 V ~1,7 m
- **Protección eléctrica por fusible** (cartucho 5x20 mm; rotulado F2AL 250 V en la unidad).
- **Top-loading:** inserción vertical del film por el borde superior para fijarlo rápidamente.



MUEBLES CLÍNICOS

NEGATOSCOPIO

SIMPLE LED

RLPROD552

MODO DE USO

- **Colocar sobre superficie** firme o fijar al muro con la herrajería adecuada.
- **Conectar** el cable IEC a 220 V y accionar ON/OFF.
- **Insertar la radiografía** verticalmente por el borde superior del visor y ajustar.
- **Al finalizar**, apagar. Desconectar si no se utilizará por periodos prolongados.



MUEBLES CLÍNICOS

NEGATOSCOPIO

SIMPLE LED

RLPROD552

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	NEGATOSCOPIO SIMPLE LED
Código	RLPROD552
Eléctricas	AC 220 V · 50–60 Hz · Conector IEC C14 con cable ~1,7 m
Ópticas	Iluminación LED (1 cara) · Brillo ≥ 2000 cd/m ² · CCT ≥ 6500 K · Uniformidad $> 0,7$ · Estabilidad ≤ 2 % · Área de visión 360 $\pm 20 \times 440 \pm 20$ mm · Difusor metacrilato opal 3 mm
Construcción & Montaje	Marco de aleación de aluminio · Sobremesa o mural (ojales tipo keyhole) · Carga superior del film · 4 patas de goma
Protección & Seguridad	Fusible 5×20 mm (F2AL 250 V) · Enchufe con toma a tierra
Entorno de operación	15–35 °C · HR ≤ 75 % · 75–106 kPa · Uso interior
Dimensiones del producto	50,5 (Ancho) × 45 (Alto) × 10,5 (Largo) cm — Peso: 2,6 kg
Dimensiones embalaje	57,2 (Ancho) × 47 (Alto) × 12,2 (Largo) cm — Peso: 3,2 kg
Incluye	Cable de alimentación IEC - fusible instalado
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 meses




MUEBLES CLÍNICOS

NEGATOSCOPIO

SIMPLE LED

RLPROD552

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

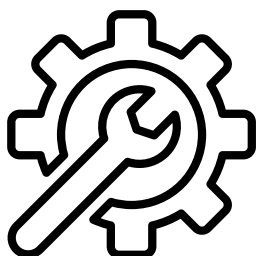

- Desconectar antes de limpiar.
- Difusor: paño de microfibra + agua con jabón neutro; secar de inmediato. No usar solventes/abrasivos.
- Revisar periódicamente cable, interruptor y porta-fusible; reemplazar solo por cartucho 5x20 mm del mismo valor.
- Evitar golpes, torsiones del marco y acumulación de polvo en ranuras.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Toma a tierra obligatoria del enchufe. No usar en lugares húmedos ni a la intemperie. (manual impreso)
- No utilizar durante tormentas eléctricas; riesgo de choque eléctrico. (manual impreso)
- Para instalación mural, asegurar fijaciones acordes al peso y tipo de muro.
- Intervenciones eléctricas solo por servicio técnico.

