

EQUIPOS MEDICOS

AED PLUS

(DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO DEA)

RLEM1798

RLEM1798 El desfibrilador externo automático ZOLL AED Plus es un dispositivo médico de respuesta rápida ante emergencias cardíacas, diseñado para asistir en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con guía visual y auditiva. Incorpora la tecnología Real CPR Help®, que proporciona retroalimentación en tiempo real sobre la calidad de las compresiones torácicas, asegurando una RCP efectiva y constante

Su diseño ergonómico y sistema de electrodos integrados CPR-D-padz® permiten una colocación intuitiva y rápida, incluso por personal no médico, optimizando los tiempos de atención ante una parada cardiorrespiratoria.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Tecnología Real CPR Help®:** mide la profundidad de compresión torácica mediante un sensor integrado, garantizando la calidad de la RCP
- **Electrodos de talla única CPR-D-padz®:** diseño de una sola pieza adaptable al 99 % de las anatomías torácicas; el electrodo apical se separa para el 1 % restante
- **Guía audiovisual completa:** instrucciones por voz y mensajes en pantalla LCD para orientar al usuario paso a paso durante la reanimación.
- **Metrónomo RCP integrado:** marca el ritmo correcto (60 – 100 compresiones/minuto) para mantener la frecuencia adecuada.



EQUIPOS MEDICOS

AED PLUS

(DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO DEA)

RLEM1798

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Comprobaciones automáticas programables:** evalúa estado de batería, electrodos, circuitos, hardware y software del microprocesador sin intervención humana
- **Alta resistencia ambiental:** carcasa con protección IP55, resistente al polvo y salpicaduras, certificada para uso en entornos exigentes.
- **Diseño robusto y portátil:** estructura liviana (3,1 kg), de transporte fácil, con cubierta abatible y compartimiento para accesorios.
- **Conectividad con software de registro:** permite descarga de eventos y trazados ECG vía infrarrojo, asegurando trazabilidad completa del uso.
- **Vida útil de electrodos:** hasta 5 años, con gel conductor de polímero y elemento metálico de estaño de baja impedancia



MODO DE USO:

- **Encienda** el equipo y siga las instrucciones por voz.
- **Coloque los electrodos CPR-D-padz®** en el tórax del paciente según el diagrama.
- **El dispositivo analiza automáticamente el ritmo cardíaco** y recomienda la descarga si es necesario.
- **Pulse el botón de descarga** cuando el indicador lo solicite.
- **Continúe con las compresiones** siguiendo el metrónomo y las indicaciones en pantalla.

(La función Real CPR Help guía en tiempo real la profundidad y frecuencia de las compresiones, aumentando la tasa de éxito de la RCP.)



EQUIPOS MEDICOS

AED PLUS

(DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO DEA)

RLEM1798

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	AED PLUS (Desfibrilador Automático DEA)
Código	RLEM1798
Forma de onda	Bifásica rectilínea
Energía de descarga	Automática preprogramada 120 J / 150 J / 200 J
Tiempo de carga	< 10 s con baterías nuevas
Tiempo de retención de carga	30 s
Electrodos compatibles	CPR-D-padz®, Pedi-padz II, Stat-padz II
Frecuencia del metrónomo	60 – 100 cpm
Profundidad recomendada	1,9 – 8,9 cm
Ritmos desfibrilables	FV > 100 μ V / TV > 150 lpm (adultos) / > 200 lpm (niños)
Rango de impedancia del paciente	0 – 300 Ω
Memoria	50 min ECG/RCP + 20 min audio + 7 h sin audio
Pantalla LCD	6,6 × 3,3 cm con vista ECG opcional
Baterías	10 × CR123A Litio (reemplazables)
Autonomía	Hasta 225 descargas o 13 h de monitorización
Dimensiones producto	13,3 cm (Alto) × 24 cm (Ancho) × 29,2 cm (Largo)
Peso producto	5,7 Kg



EQUIPOS MEDICOS

AED PLUS

(DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO DEA)

RLEM1798

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Normas de diseño	UL 2601, AAMI DF-39, IEC 60601-1/2, EN 60601-1
Temperatura de uso	0 °C – 50 °C
Humedad relativa	10 % – 95 % sin condensación
Altitud de operación	–91 m a 4573 m
Grado de protección	IP-55
Clase eléctrica	Clase II (alimentación interna)
Contenido del paquete	Unidad principal ZOLL AED Plus , Electrodo CPR-D-padz® (talla única), 10 baterías CR123A Litio, Kit básico RCP, Manual de usuario, Estuche de transporte
Dimensiones del embalaje	30,4 cm (Largo) x 33,5 cm (Ancho) x 30 cm (Alto)
Peso total con embalaje	9,3 kg
Procedencia	EE. UU
Marca	ZOLL Medical Corporation
Certificación ISP	DM 620/24 (Chile)
Garantía	5 años




EQUIPOS MEDICOS

AED PLUS

(DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO DEA)

RLEM1798

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

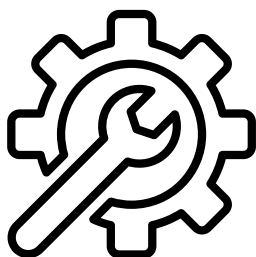

- Realizar auto-pruebas periódicas según la configuración del dispositivo (por defecto cada 7 días).
- Limpiar con paño suave húmedo; no emplear disolventes ni productos abrasivos.
- Sustituir baterías y electrodos tras uso o cuando el equipo lo indique.
- Guardar en lugar seco entre -30°C y 60°C ; proteger de impactos o caídas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Usar solo electrodos originales ZOLL (CPR-D-padz®, Pedi-padz II o Stat-padz II).
- No utilizar sobre superficies metálicas o húmedas.
- No operar cerca de gases inflamables o atmósferas con oxígeno suplementario.
- Supervisar periódicamente el indicador de estado (X roja = mantenimiento necesario).
- Capacitar al personal según normativas AHA y EN 60601 para asegurar uso seguro y efectivo.



EQUIPOS MEDICOS

CPR STAT PADZ PARCHE ADULTO

ZOLL AED PLUS

RLEM1799

RLEM1799 Los CPR Stat-Padz® 8900-0400 son electrodos de desfibrilación desarrollados por ZOLL Medical Corporation para optimizar las maniobras de RCP y desfibrilación en pacientes adultos. Incorporan una estructura flexible de polímero conductor y gel iónico que garantiza una transmisión eléctrica estable, incluso durante compresiones torácicas continuas, mejorando la eficacia del tratamiento en situaciones de emergencia.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Diseño ergonómico** de una sola pieza, que facilita la colocación rápida y precisa.
- **Compatibles con la línea de desfibriladores ZOLL AED Plus**, lo que asegura integración directa sin adaptadores.
- **Superficie adhesiva hipoalergénica**, que mantiene la fijación sin irritar la piel.
- **Material conductor optimizado**, que reduce la impedancia y mejora la dispersión de la energía eléctrica.
- **Tecnología Real CPR Help®**, que ofrece retroalimentación sobre la calidad de las compresiones durante la reanimación.
- **Identificación visual clara en el envase**, con instrucciones ilustradas para uso inmediato.
- **Envase sellado individualmente**, que preserva la esterilidad y prolonga la vida útil.
- **Diseñados para un solo uso**, garantizando seguridad y desempeño en cada aplicación.



EQUIPOS MEDICOS

CPR STAT PADZ PARCHE ADULTO

ZOLL AED PLUS

RLEM1799

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CPR STAT PADZ PARCHE ADULTO ZOLL AED PLUS
Código	RLEM1799
Tipo de paciente	Adulto
Conexión	Cable preinstalado con conector ZOLL
Compatibilidad	ZOLL AED Plus y desfibriladores ZOLL serie AED
Tecnología de soporte RCP	Real CPR Help®
Material conductor	Metal con gel de infusión salina
Adhesivo	Polímero médico hipoalergénico
Condiciones de almacenamiento	0 °C a 50 °C / HR 10 – 95 % sin condensación
Contenido del paquete	1 par de electrodos CPR Stat-Padz® (adulto), Instrucciones de colocación visuales, Sobre estéril con sellado individual, Conector preinstalado
Procedencia	EE. UU
Marca	ZOLL Medical Corporation
Certificación	FDA / CE / ISP DM 620/24
Garantía	5 años desde la fecha de fabricación




EQUIPOS MEDICOS

CPR STAT PADZ PARCHE ADULTO

ZOLL AED PLUS

RLEM1799

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

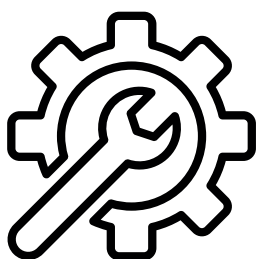

- Mantener en su envase original sellado hasta el momento de uso.
- No exponer a calor ni humedad excesiva.
- Verificar fecha de vencimiento antes de instalación.
- Sustituir si el empaque presenta daños o si el producto ha expirado.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Usar exclusivamente con equipos ZOLL AED Plus o compatibles.
- No aplicar sobre piel lesionada o mojada.
- Asegurar que el paciente no esté en contacto con superficies metálicas.
- Desechar conforme a normativas de residuos biológicos.



EQUIPOS MEDICOS

PEDI-PADZ® II PARCHE PEDIATRICO

ZOLL AED PLUS

RLEM1800


RLEM1800 Los **PEDI-PADZ® II** son electrodos pediátricos diseñados para su uso con los desfibriladores ZOLL AED Plus, ofreciendo una terapia segura y adaptada a niños de hasta 8 años o 25 kg de peso.

Integran algoritmos específicos para ritmo cardíaco infantil, que permiten al equipo reducir automáticamente la energía de descarga y ofrecer una terapia de desfibrilación pediátrica precisa y controlada.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Diseño pediátrico especializado**, con energía ajustada automáticamente por el equipo según el peso y edad del paciente.
- **Indicaciones visuales en el empaque**, que facilitan la colocación correcta de los parches.
- **Comunicación automática con el desfibrilador**: el dispositivo reconoce los electrodos pediátricos y activa las instrucciones de voz y texto adecuadas.
- **Algoritmos exclusivos de análisis pediátrico**, que optimizan la identificación de ritmos desfibrilables en niños.
- **Compatibilidad profesional ampliada**: también operan con desfibriladores hospitalarios ZOLL R Series®, Propaq® MD y X Series®, lo que permite continuidad en la atención.
- **Material adhesivo hipoalergénico y flexible** que garantiza contacto estable durante la reanimación.

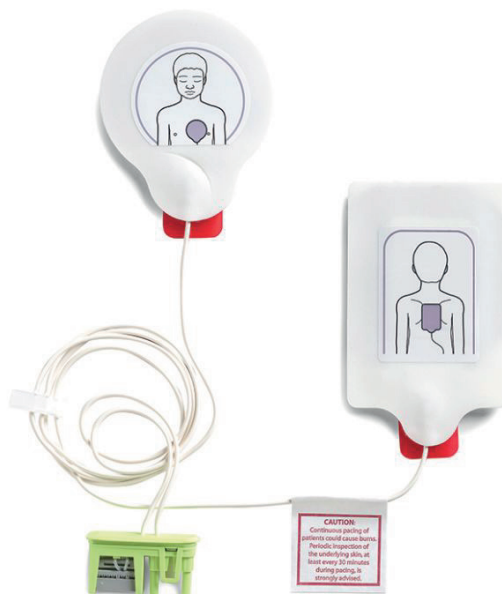

EQUIPOS MEDICOS

PEDI-PADZ® II PARCHE PEDIATRICO

ZOLL AED PLUS

RLEM1800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	PEDI-PADZ® II PARCHE PEDIATRICO ZOLL AED PLUS
Código	RLEM1800
Tipo de paciente	Pediátrico (≤ 8 años / ≤ 25 kg)
Tipo de uso	Desechable, un solo uso
Compatibilidad DEA	AED Plus®, AED Pro®, ZOLL AED 3®, AED 3 BLS®
Compatibilidad profesional	R Series®, Propaq® MD, X Series®, X Series Advanced
Tipo de conexión	Conector verde AED ZOLL
Pre-conexión	Sí
Cable conductor	Longitud 31,75" (≈ 80 cm) / 13,00" (≈ 33 cm) según modelo
Forma almohadilla frontal	Redonda 4,52 " $\times$ 3,70 " / área 17 in ² / gel círculo 2,85 " (área 6,4 in ²)
Forma almohadilla esternón-espalda	Rectangular 4,81 " $\times$ 3,47 " / área 17 in ² / gel 3,58 " $\times$ 2,18 " (área 7,8 in ²)
Contenido del paquete	1 par de electrodos PEDI-PADZ® II (pediátrico), Manual ilustrado de colocación, Cable preconectado verde ZOLL, Sobre estéril con sellado individual
Procedencia	EE. UU
Marca	ZOLL Medical Corporation
Certificación	FDA / CE / ISP DM 620/24
Garantía	2 años desde la fecha de fabricación




EQUIPOS MEDICOS

PEDI-PADZ® II PARCHE PEDIATRICO

ZOLL AED PLUS

RLEM1800

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

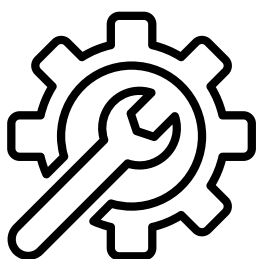

- Mantener sellado y protegido de la luz solar directa.
- No reutilizar tras su aplicación o uso en entrenamiento.
- Verificar la fecha de caducidad antes de instalar en el equipo.
- Conservar en ambiente seco entre 0 °C y 50 °C, humedad ≤ 95 % sin condensación.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Utilizar exclusivamente con equipos ZOLL AED Plus o modelos compatibles.
- No aplicar sobre piel lesionada ni húmeda.
- Garantizar que el paciente no esté en contacto con superficies metálicas durante la descarga.
- Desechar de acuerdo con las normativas vigentes de residuos biológicos.



EQUIPO MÉDICO

GABINETE DEA IMPORTADO

BLANCO


RL123-2

RL123-2 El Gabinete para DEA está diseñado para mantener el desfibrilador externo automático en un lugar seguro, visible y de fácil acceso para todo público. Incorpora señal acústica y luminosa que se activa al abrir la puerta, permitiendo alertar al personal cercano e iniciar rápidamente los protocolos de emergencia. Su estructura metálica con recubrimiento en pintura electrostática y ventana acrílica frontal permite visualizar el estado del equipo sin necesidad de abrir el gabinete.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Gabinete mural metálico** para resguardo y señalización clara de desfibrilador externo automático (DEA) en espacios públicos e institucionales.
- Sistema de alarma integrado:** sirena acústica interna y baliza luminosa superior que se activan automáticamente al abrir la puerta.
- Puerta frontal con visor acrílico amplio** que permite comprobar la presencia y estado general del DEA sin necesidad de abrir el gabinete, más manilla de fácil prensión para una apertura rápida.
- Señalética externa específica para DEA**, con texto "DESFIBRILADOR" y pictogramas inferiores que recuerdan los pasos básicos de uso del equipo.
- Estructura en acero con recubrimiento de pintura electrostática**, bordes redondeados y superficies lisas, resistentes a la corrosión y de fácil limpieza.
- Dimensiones y volumen interno compatibles** con la mayoría de modelos estándar de DEA y su kit de RCP, con módulo de alarma alimentado por pila alcalina independiente del dispositivo.

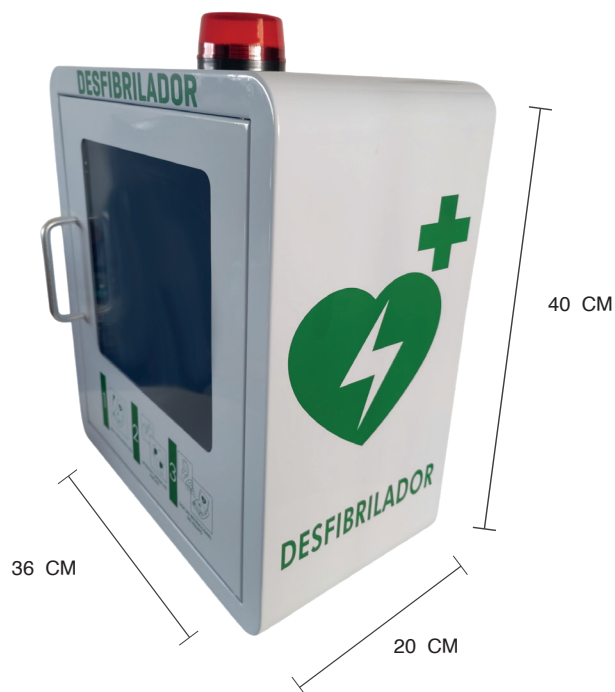

EQUIPO MÉDICO

GABINETE DEA IMPORTADO

BLANCO

RL123-2

MODO DE USO:

- **Fijar el gabinete a un muro resistente** a la altura recomendada, en un punto visible y libre de obstáculos.
- **Colocar el DEA dentro del gabinete**, organizando sus accesorios sin obstruir la apertura de la puerta ni el acceso al equipo.
- **Conectar y comprobar el funcionamiento del módulo de alarma** (pila alcalina instalada y baliza bien atornillada).
- **En caso de emergencia**, abrir la puerta, retirar el DEA y seguir las indicaciones del desfibrilador; la alarma sonora y luminosa se activará para alertar al entorno.
- **Tras la emergencia**, apagar la alarma desde el interruptor interno, verificar el estado del DEA y volver a cerrar el gabinete.



EQUIPO MÉDICO

GABINETE DEA IMPORTADO

BLANCO

RL123-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	GABINETE DEA IMPORTADO BLANCO
Código	RL123-2
Tipo de producto	Gabinete mural para DEA con alarma sonora y luminosa
Material estructura	Acero con recubrimiento de pintura electrostática
Material puerta	Acrílico transparente frontal
Sistema de alarma	Señal acústica + baliza luminosa activadas al abrir la puerta
Tipo de batería	Pila alcalina (módulo interno reemplazable por el usuario)
Dimensiones externas	Alto 40 cm / Ancho 36 cm / Largo 20 cm
Peso	5 kilos
Instalación	Fijación mural (incluye perforaciones posteriores para anclaje)
Señalética exterior	Pictogramas “DEFIBRILADOR” y símbolo DEA en laterales y frontal
Instrucciones en puerta	Secuencia gráfica 1-2-3 para el uso básico del DEA
Códigos por color	RL123-1 Verde / RL123-2 Blanco / RL123-3 Naranja
Compatibilidad	Apto para la mayoría de desfibriladores externos automáticos de uso público
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	12 Meses




EQUIPO MÉDICO

GABINETE DEA IMPORTADO

BLANCO

RL123-2

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

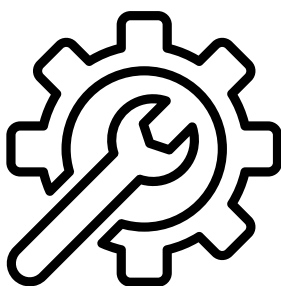

- Limpiar periódicamente la superficie metálica y el acrílico con paño suave y detergente neutro; evitar solventes abrasivos.
- Revisar mensualmente el estado de bisagras, cerradura y fijaciones al muro.
- Comprobar el funcionamiento de la alarma (sonora y luminosa) y reemplazar la pila alcalina cuando la señal sea débil o intermitente.
- Mantener el interior del gabinete seco, libre de polvo y sin objetos ajenos al desfibrilador.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Instalar el gabinete en un lugar señalizado, de alta visibilidad y fácil acceso para el público general.
- No sobrecargar el interior con otros elementos que dificulten la extracción rápida del DEA.
- Proteger el gabinete de golpes directos y de la exposición prolongada a lluvia o humedad extrema (recomendado para uso interior o zonas techadas).
- Capacitar regularmente al personal sobre la ubicación del gabinete, el acceso al DEA y los protocolos de actuación en caso de paro cardiorrespiratorio.

RESCATE Y EMERGENCIAS

KIT DE SEÑALÉTICAS DEA

RLEM1794

RLEM1794 El Kit de Señaléticas DEA está pensado para mejorar la orientación y visibilidad de un Desfibrilador Externo Automático dentro de una instalación, ayudando a que el equipo sea fácil de identificar y que el recorrido hasta su ubicación sea más intuitivo en situaciones de emergencia. Su combinación de señalización direccional y material informativo permite reforzar la cultura de respuesta ante eventos cardiovasculares, apoyando la comunicación visual en pasillos, accesos y puntos de alto tránsito sin requerir instalaciones complejas.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Kit de señalización mixto:** combina adhesivos para guía/identificación y letreros rígidos para información visible.
- Terminación brillante en las señaléticas adhesivas** para una lectura más clara y de alto contraste.
- Letreros informativos en cartón pluma (plumavit comprimido):** livianos, rígidos y aptos para instalación fija.
- Señalética** diseñada para facilitar la orientación por flechas y el reconocimiento rápido del símbolo DEA.
- Incluye piezas informativas** para apoyar la actuación frente a una emergencia (uso del DEA y algoritmo RCP/DEA).




RESCATE Y EMERGENCIAS

KIT DE SEÑALÉTICAS DEA

RLEM1794

MODO DE USO:

- **Definir la ubicación del DEA** y los puntos de decisión del recorrido (accesos, pasillos, cambios de dirección).
- **Instalar las señaléticas adhesivas** en lugares visibles, priorizando esquinas y zonas donde se deba indicar dirección.
- **Colocar los letreros informativos** en un punto cercano al DEA o en un sector estratégico donde el personal pueda consultarlos con rapidez.
- **Verificar visibilidad:** que la señalética quede libre de obstáculos y orientada al flujo normal de circulación.

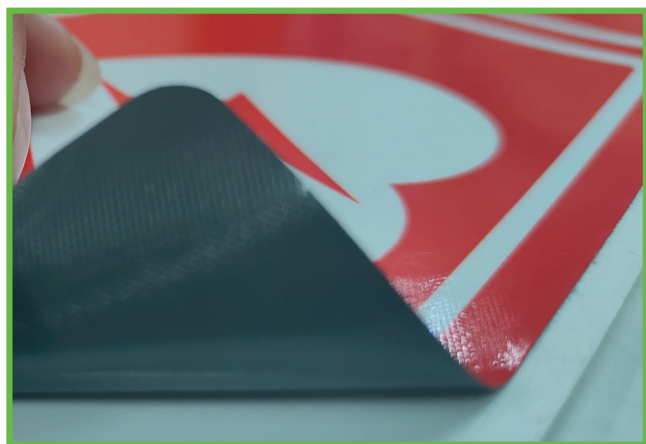

RESCATE Y EMERGENCIAS

KIT DE SEÑALÉTICAS DEA

RLEM1794

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	KIT DE SEÑALÉTICAS DEA
Código	RLEM1794
Tipo	Señalización mixta: adhesivos + letreros rígidos
Contenido total	8 piezas
Distribución por tipo	2 letreros impresos en cartón pluma + 6 señaléticas en adhesivo brillante
Material letreros	Cartón pluma (plumavit comprimido) impreso
Material adhesivos	Adhesivo autoadhesivo con terminación brillante
Letrero "Algoritmo RCP/DEA"	51 cm (ancho) × 39,5 cm (alto)
Letrero "Uso del DEA"	21 cm (ancho) × 39,5 cm (alto)
Señalética adhesiva	33 cm (ancho) × 21 cm (alto) / 16 cm (ancho) × 23 cm (alto) / 25 cm (ancho) × 13 cm (alto)
Diseño / contraste	Rojo y blanco (alta visibilidad)
Uso recomendado	Señalización y orientación hacia DEA en interiores
Referencia en lámina	Ley 21.156 (mencionada en el material)
Procedencia	Fabricación Nacional
Marca	RescateLife




RESCATE Y EMERGENCIAS

KIT DE SEÑALÉTICAS DEA

RLEM1794

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

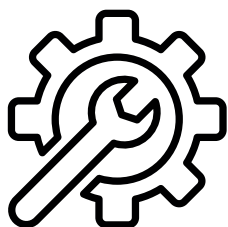

- Adhesivos brillosos: limpiar con paño suave levemente húmedo; evitar abrasivos, cloro concentrado o solventes.
- Cartón pluma: limpieza en seco (pañó suave/plumero). Si se requiere, paño apenas húmedo sin saturar el material.
- Mantener las piezas libres de polvo y suciedad para conservar legibilidad y contraste.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Instalar sobre superficies limpias, secas y lisas para asegurar adherencia y terminación prolija.
- Evitar zonas con humedad constante, salpicaduras directas o calor intenso.
- Evitar zonas con humedad constante, salpicaduras directas o calor intenso.
- Revisar periódicamente que la señalética mantenga buena fijación y visibilidad (sin bordes levantados u obstrucciones).

