

RESCATE Y EMERGENCIA

BOLSO VÍA VENOSA

BAGLIFE

BL102

BL102 El Bolso Vía Venosa está diseñado para organizar y trasladar de forma segura insumos y equipos de emergencia. Su estructura reforzada, interior modular y alta visibilidad lo convierten en una solución integral para ambulancias, servicios de urgencia y unidades de rescate que requieren acceso rápido y ordenado al material crítico.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Material resistente y lavable:** Exterior en tela tipo Oxford de alta resistencia e interior de fácil limpieza, pensado para uso intensivo en ambulancias y urgencias.
- Organización modular:** Compartimiento principal tipo libro con paneles transparentes y elásticos; bolsillos frontales organizadores; bolsillos laterales con tapa y velcro; bolsillo superior independiente.
- Alta visibilidad e identificación:** Color rojo de emergencia con bandas reflectantes y ventana posterior para tarjeta de ID.
- Transporte cómodo y seguro:** Asas superiores acolchadas, correa de hombro ajustable y desmontable con hombrera, más base con patines plásticos que protegen el bolso del suelo.
- Enfoque clínico:** Diseñado para ordenar y visualizar rápidamente insumos críticos de vía venosa y emergencias, reduciendo tiempos de búsqueda durante la atención.



RESCATE Y EMERGENCIA

BOLSO VÍA VENOSA

BAGLIFE

BL102

MODO DE USO:

- **Clasificar los insumos** por categoría (vía venosa, curación, vía aérea, etc.) y distribuirlos en el compartimiento principal, bolsillos frontales, laterales y superior según la frecuencia de uso.
- **Usar los paneles transparentes y elásticos internos** para mantener a la vista jeringas, gasas, cánulas y otros elementos de acceso rápido.
- **Fijar equipos o cilindros portátiles** utilizando las correas internas del compartimiento principal, verificando que queden firmes antes del traslado.
- **Completar la tarjeta identificadora** con el nombre del servicio o unidad y colocarla en la ventana posterior.
- **Cerrar correctamente cierres** y tapas con velcro y elegir el modo de transporte (asas o correa de hombro) según la distancia y el peso del contenido, manteniendo el bolso siempre accesible durante la intervención.



RESCATE Y EMERGENCIA

BOLSO VÍA VENOSA

BAGLIFE

BL102

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	Bolso vía venosa BAGLIFE
Código	BL102
Materiales	Exterior: Tela tipo Oxford de alta resistencia. Interior: Revestimiento sintético de fácil limpieza.
Color y señalización	Rojo con bandas reflectantes en tapa, frontal y laterales para mayor visibilidad.
Dimensiones y volumen útil	21 cm (Largo) x 52 cm (Ancho) X 32(Alto) Volumen geométrico útil aproximado: 35 L.
Peso	2,10 kilos
Distribución interna y compartimientos	Compartimiento principal tipo libro con paneles transparentes y correas de sujeción; bolsillos frontales organizadores; bolsillos laterales con tapa y velcro; bolsillo superior independiente.
Elementos externos y porta herramientas	Bandas elásticas internas para material; base con patines plásticos de apoyo; bolsillo posterior con ventana para ID.
Sujeción y transporte	Asas superiores acolchadas y correa de hombro ajustable y desmontable con hombrera.
Sistema de cierre	Cierres de alta resistencia con tiradores de fácil agarre; cierre con velcro en bolsillos laterales.
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife / BagLife
Certificación	CE – ISO13485
Garantía	12 meses

* Se comercializa vacío, sin insumos médicos incluidos




RESCATE Y EMERGENCIA

BOLSO VÍA VENOSA

BAGLIFE

BL102

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

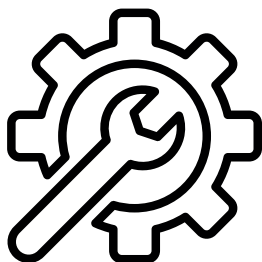

- Vaciar el contenido y, si es necesario, retirar módulos/separadores antes de la limpieza.
- Limpiar exterior e interior con paño suave y solución de agua con detergente neutro, sin usar abrasivos.
- Aplicar desinfectantes compatibles con materiales textiles según protocolo institucional, dejando secar completamente a la sombra.
- Guardar el bolso en lugar seco y ventilado, evitando apoyarlo de forma permanente en superficies húmedas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- No exceder una carga que comprometa las costuras, cierres, asas o herrajes.
- Evitar el contacto con superficies cortantes, abrasivas o con altas temperaturas que puedan dañar el tejido.
- Revisar periódicamente cierres, velcros, mosquetones y patines; sustituir o reparar ante signos de desgaste relevante.
- Utilizar el bolso únicamente para el transporte y organización de insumos y equipos médicos, no como soporte de peso corporal ni para usos distintos a los previstos.

