

MUEBLES CLÍNICOS

CARRO ANESTESIA ABS

RLIMP008

RLIMP008 Carro clínico de uso intensivo para anestesia y procedimientos. Estructura en ABS de alto impacto con barandas y herrajes en acero inoxidable. Integra módulo superior con 10 compartimentos basculantes, ideal para fármacos, dispositivos de vía aérea y material de rotación rápida. Su diseño favorece acceso visual inmediato, trazabilidad (cierre central con precinto) y higiene gracias a superficies lisas y no porosas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Módulo superior de 10 gavetas basculantes** (apertura tipo "tilt") con frentes traslúcidos para lectura visual y portarótulos; estructura soportada por columnas de acero inoxidable.
- **Encimera rebordeada con baranda inox 3 lados:** minimiza caídas durante la preparación de fármacos.
- **Cierre de seguridad:** Sistema de cierre centralizado con perilla para precinto tamper-evident, compatible con sellos de seguridad seriados (8 unidades). El N° de serie permite registrar aperturas/cierres y evidenciar manipulaciones no autorizadas.
- **Bandeja lateral retráctil** para ampliar superficie de trabajo sin bloquear el paso.
- **Gestión de residuos integrada:** 2 basureros laterales + canasto con 2 contenedores para punzocortantes.
- **Set de separadores internos** (6 medidas) para ordenar por familias y aplicar FIFO.
- **Cajones con sistema de cierre suave (soft-close):** reduce golpes, vibraciones y riesgo de derrames
- **Porta-etiqueta frontal en cada cajón:** facilita rotulación visible y control FIFO.



MUEBLES CLÍNICOS

CARRO ANESTESIA ABS

RLIMP008

- **Ruedas médicas antiestáticas Ø100 mm (2 con freno):** desplazamiento silencioso y menor acumulación de polvo por estática.
- **Seguridad y durabilidad:** esquinas redondeadas, paragolpes perimetral, polímeros de alto impacto y acero inox resistente a desinfectantes.

MODO DE USO:

- **Active frenos al estacionar.** Rotule los cajones desde el porta-etiquetas. Cierre los cajones sin forzar; el sistema soft-close completará el cierre.
- **Configure separadores** y rotule cajones/compartimentos superiores según protocolo.
- **Mantenga el precinto del cierre central fuera de turno;** registre aperturas.
- **Use la bandeja retráctil para preparar;** deseche inmediatamente en basureros/punzocortantes.
- **Finalizada la jornada:** limpie y desinfecte, reponga inventario, reprecinte y verifique el inventario crítico.



MUEBLES CLÍNICOS

CARRO ANESTESIA ABS

RLIMP008

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CARRO ANESTESIA ABS
Código	RLIMP008
Dimensiones y peso	Carro 62,3 (Ancho) × 48 (Largo) × 95 (Alto) cm · Módulo sup. 60 (Ancho) × 11 (Largo) × 33 cm (altura) · 36 kg (empaque 40 kg)
Materiales y acabados	Cuerpo ABS alto impacto · Barandas/herrajes inox · Bins polímero traslúcido · Superficies lisas, no porosas, de fácil desinfección
Almacenamiento y organización	2 Pequeños 46,5 ancho x 41,5 largo x 6,5 alto / 2 Medianos 46,5 ancho x 41,5 largo x 10,5 alto / 1 Grande 46,5 ancho x 40 largo x 16,5 alto. Riel telescópico metálico y sistema de cierre suave; porta-etiqueta exterior por cajón; separadores 30 pzs/6 medidas; módulo superior 10 bins basculantes.
Accesorios laterales	Bandeja retráctil · Canasto 33 (Ancho) × 16 (Largo) × 14 cm (Alto) con 2 punzocortantes · 2 basureros abiertos
Movilidad y protección	4 ruedas médicas antiestáticas Ø100 mm (2 con freno), giro 360°; zócalo perimetral y esquinas redondeadas
Cierre y seguridad	Cierre centralizado con perilla + precinto (tamper-evident) · Compatibilidad de limpieza: IPA 70%, amonios; clorados diluidos con enjuague
Color / carga orientativa	Blanco/Azul + inoxidable 8–10 kg por cajón / 30–35 kg totales (referencial)
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	12 Meses




MUEBLES CLÍNICOS

CARRO ANESTESIA ABS

RLIMP008

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

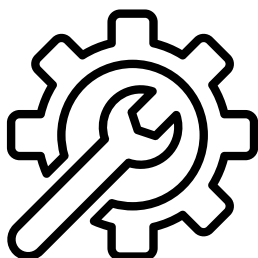

- Lavar con detergente neutro, enjuagar y desinfectar con IPA 70 % o amonios cuaternarios.
- Para clorados, usar bajas diluciones y retirar residuos con paño húmedo.
- Retirar canasto, punzocortantes y basureros para lavado por separado.
- Revisar periódicamente frenos, fijaciones de rieles y estado de ruedas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Distribuir peso privilegiando los cajones inferiores.
- Mantener frenos activados durante el uso y en ascensores.
- No usar como plataforma para subirse ni para equipos fuera de la carga orientativa.
- Mantener rotulación y fechas para trazabilidad de medicamentos e insumos.

