

MUEBLES CLÍNICOS

CARRO DE PARO ABS GRANDE

RL1001

RL1001 Carro clínico de respuesta rápida para áreas críticas y procedimientos. Combina cuerpo de ABS médico con estructura y asas en aluminio/metal, lo que entrega alta higiene, resistencia a químicos y bajo mantenimiento. Su cubierta superior con reborde y barandas perimetrales evita derrames; la cajonería modular y los accesorios integrados (porta-monitor, porta-suero, gestión de residuos y energía) optimizan el trabajo del equipo de salud en reanimación y urgencias.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Organización eficiente:** cajonería en 5 niveles con rieles suaves y porta-etiquetas externos; sistema de separadores internos configurables.
- Superficie de trabajo segura:** cubierta con reborde antiderrame y barandas inox; bandeja retráctil adicional tipo meseta.
- Accesorios clínicos integrados:** bandeja porta-monitor desmontable, porta-suero telescópico, doble basurero y depósito para punzocortantes/jeringas.
- Energía a bordo:** zapatilla eléctrica integrada para equipos de monitoreo.
- Movilidad hospitalaria:** ruedas con giro de 360° (dos con freno) y múltiples asas de maniobra, incluyendo baranda perimetral superior.
- Sujeción de oxígeno:** base retráctil con correa de velcro para cilindro.
- Seguridad del contenido:** cierre por llave tradicional.



MUEBLES CLÍNICOS

CARRO DE PARO ABS GRANDE

RL1001

MODO DE USO:

- **Estacione y bloquee** con frenos antes del procedimiento.
- **Configure los cajones con separadores** según protocolo (vía aérea, fármacos, dispositivos) y rotúlelos desde los porta-etiquetas.
- **Monte el porta-monitor y regule el porta-suero;** verifique firmeza de perillas.
- **Utilice la bandeja retráctil** como apoyo de preparación y deposite residuos en los contenedores laterales según codificación.
- **Conecte equipos a la zapatilla** integrada manteniendo cables ordenados y secos.
- **Tras la atención,** restituya insumos, retire residuos y cierre con llave.
- **Para traslado,** libere frenos y conduzca desde las asas; evite sobrecargar la cubierta.



MUEBLES CLÍNICOS

CARRO DE PARO ABS GRANDE

RL1001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CARRO DE PARO ABS GRANDE
Código	RL1001
Materiales	Cuerpo en ABS médico; chasis/asas metálicas; accesorios en acero inoxidable y polímeros técnicos.
Dimensiones del carro	52,3 cm (Largo) × 66 cm (Ancho base) × 85 cm (con asas) × 106 cm (Alto)
Movilidad	4 ruedas hospitalarias 360° (2 con freno + 2 libres).
Superficie de trabajo	Bandeja superior con baranda + bandeja porta-monitor 41×32×3,3 cm.+ bandeja retráctil 39,4×40×5 cm (2 por lado) y asa perimetral superior
Almacenamiento (gavetas)	2 Pequeños 56 ancho x 40,5 largo x 6,5 alto / 2 Medianos 56 ancho x 40,5 largo x 10 alto / 1 Grande 56 ancho x 40 largo x 16,5 alto. ;Riel telescópico ; porta-tarjetas por gaveta
Organizadores internos	Separadores (24 piezas): 3 de 37×9,3 cm; 3 de 52×9,3 cm; 3 de 37,1×9,3 cm; 3 de 52×9,3 cm; 6 de 37×5,5 cm ; 6 de 52×5,5 cm
Accesorios clínicos	Porta-suero 4 ganchos; 2 basureros; depósito de jeringas/punzocortantes; bandeja papeles 40,5 × 30 × 11 cm; tabla RCP 53,2×34,4×2,4 cm ; soporte de oxígeno (correa de velcro + base retráctil)
Seguridad y energía	Cerradura tradicional con llave centralizada • Zapatilla integrada de 4 tomas.
Peso	39,85 kg (producto) – 42 kg (con embalaje)
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	12 Meses




MUEBLES CLÍNICOS

CARRO DE PARO ABS GRANDE

RL1001

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

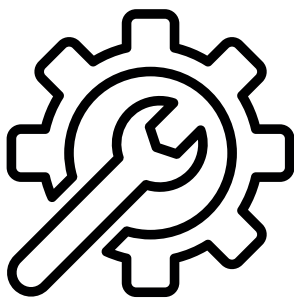

- ABS: paño suave con detergente neutro; desinfectar con alcohol al 70 % o amoníaco cuaternario; evitar solventes/abrasivos.
- Acero inoxidable/metal: limpiar con detergente neutro, enjuagar y secar para prevenir manchas.
- Cajones y rieles: retirar separadores, limpiar y secar; si hay ruido, aplicar gota de silicona en riel.
- Ruedas y frenos: inspección semanal; retirar pelusas/hilos y reapretar herrajes.
- Eléctrico: mantener zapatilla y cables secos, sin sobrecarga.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Cargar en forma segura: priorizar cajones inferiores para peso; mantener punzantes en contenedores.
- Traslado/estacionamiento: movilizar desde las asas, frenos liberados; activar frenos en uso y en ascensores.
- Uso responsable: no subirse al carro ni usar porta-monitor/porta-suero como punto de tracción.
- Control del contenido: guardar con llave y registrar aperturas según protocolo interno.
- Almacenamiento: conservar en lugar seco y bajo techo; evitar golpes y derrames.

