

MUEBLES CLÍNICOS


CARRO PARO ABS MEDIANO

RL1004

RL1004 Carro de paro para áreas clínicas y de urgencia, diseñado para respuesta rápida y organización segura del material crítico. Su arquitectura híbrida (aluminio + ABS) ofrece alta resistencia a impacto y agentes químicos, superficies lisas de fácil sanitización y gran maniobrabilidad para operar en pasillos y boxes estrechos. Incorpora soluciones integradas para monitor/desfibrilador, sueros, energía eléctrica, gestión de residuos y orden de insumos.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Estructura higiénica y robusta:** paneles y cubiertas en ABS con armazón de aluminio; esquinas redondeadas y bandeja superior con baranda perimetral para evitar caídas.
- **Movilidad controlada:** ruedas hospitalarias con giro 360°; dos con freno para estacionamiento seguro y asa perimetral que facilita el desplazamiento.
- **Almacenamiento eficiente:** gavetas con guías de deslizamiento suave, porta-etiquetas frontal y kit de separadores modulares para ordenar fármacos e insumos.
- **Puesto de trabajo ampliable:** bandeja auxiliar retráctil tipo “mesa de procedimientos” y bandeja porta-monitor independiente para desfibrilador/electromédicos.
- **Accesorios clínicos integrados:** porta-suero de 4 ganchos, zapatilla múltiple, contenedores de residuos y punzocortantes, tabla rígida de RCP y soporte/abrazo para cilindro de oxígeno.

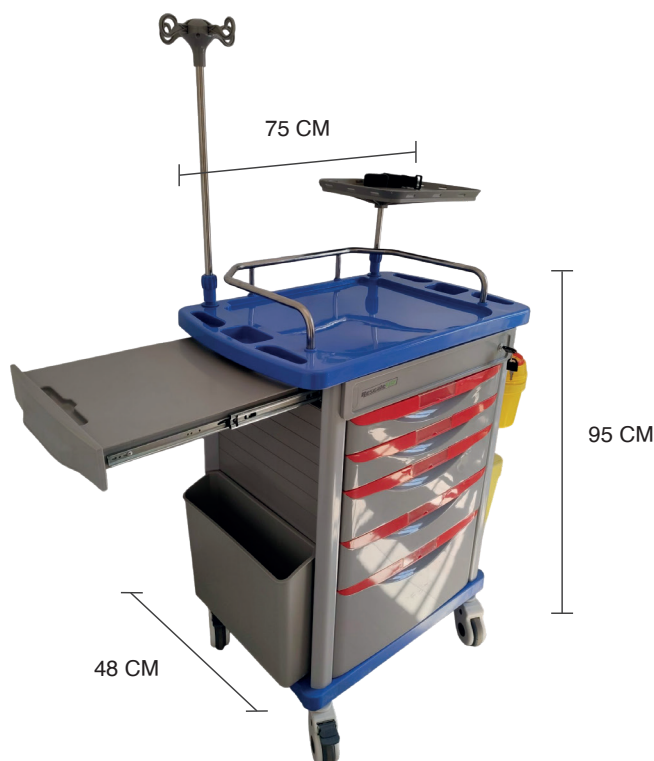

MUEBLES CLÍNICOS

CARRO PARO ABS MEDIANO

RL1004

MODO DE USO:

- **Traslado y posicionamiento:** lleve el carro al punto de atención utilizando las asas; accione frenos en dos ruedas antes de iniciar el procedimiento.
- **Preparación del puesto:** disponga el material en la bandeja superior; extienda la bandeja retráctil cuando requiera superficie adicional.
- **Configuración del equipo:** ubique monitor/desfibrilador en la bandeja porta-monitor; conecte equipos a la zapatilla integrada si se necesita alimentación eléctrica.
- **Acceso a insumos:** organice medicamentos y dispositivos en las gavetas utilizando los separadores; identifique cada bandeja con el porta-tarjetas.
- **Gestión de residuos:** utilice los basureros y el depósito para punzocortantes de acuerdo con normativa local.
- **Cierre y traslado:** retire residuos, bloquee las gavetas con la llave central, libere frenos y traslade a bodega o estación de enfermería.



MUEBLES CLÍNICOS

CARRO PARO ABS MEDIANO

RL1004

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CARRO DE PARO ABS MEDIANO
Código	RL1004
Dimensiones del carro	48 cm (Largo) × 60 cm (Ancho base) × 75 cm (con asas) × 95 cm (Alto)
Materiales / Construcción	Cuerpo en ABS médico; chasis/asas metálicas; accesorios en acero inoxidable y polímeros técnicos.
Movilidad	4 ruedas giro 360° (2 con freno + 2 libres)
Superficie de trabajo	Bandeja superior con baranda + bandeja porta-monitor 38 × 3,3 × 30 cm + bandeja retráctil 35,5 × 4 × 38,5 cm (2 por lado) y asa perimetral superior
Almacenamiento (gavetas)	2 Pequeños 47,3 ancho x 37,5 largo x 6 alto / 2 Medianos 47,3 ancho x 37,5 largo x 9,5 alto / 1 Grande 47 ancho x 36 largo x 16 alto. ; Riel telescópico ; porta-tarjetas por gaveta
Organizadores internos	Separadores (30 piezas): 9 de 43,2 × 9 cm; 9 de 34,1 × 9 cm; 6 de 34,1 × 5,5 cm; 6 de 43,2 × 5,5 cm
Accesorios clínicos	Porta-suero 4 ganchos; 2 basureros; depósito de jeringas / punzocortantes; bandeja papeles 40,5 × 30 × 11 cm; tabla RCP 34,4 × 53,2 × 2,4 cm; soporte de oxígeno (correa de velcro + base retráctil)
Seguridad y energía	Cerradura tradicional con llave centralizada • Zapatilla integrada de 4 tomas.
Peso	36,85 kg (producto) – 39 kg (con embalaje)
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	12 Meses




MUEBLES CLÍNICOS

CARRO PARO ABS MEDIANO

RL1004

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

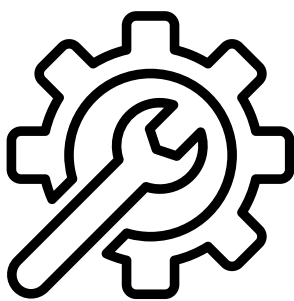

- Limpiar superficies de ABS y barandas con paño suave y detergente neutro; desinfectar con amoníaco cuaternario o alcohol isopropílico según protocolo del centro.
- Revisar semanalmente el estado de guías, cerradura y porta-tarjetas; lubricar guías si el fabricante del lubricante lo permite para uso clínico.
- Inspeccionar ruedas (ejes, frenos y banda de rodado) y retirar fibras o suciedad acumulada.
- Verificar integridad de la zapatilla y cableado antes de cada jornada; no exceder la carga eléctrica recomendada por la institución.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Mantener las gavetas ordenadas con separadores e identificación visible para acelerar la reposición y el inventario.
- Activar siempre los frenos antes de usar equipos sobre el carro o durante RCP.
- No usar solventes abrasivos ni cloro concentrado directo sobre ABS y aluminio.
- Evitar sobrecargar la bandeja porta-monitor; utilizarla sólo para los equipos previstos y con cables correctamente guiados.
- Sustituir de inmediato contenedores de punzocortantes al alcanzar el nivel indicado por el fabricante.

