

MUEBLES CLÍNICOS


CARRO PARO ABS 750

RLIMP007

RLIMP007 Carro de paro para respuesta rápida en emergencias. Combina cuerpo en ABS médico con componentes en acero inoxidable, cierre centralizado con sello tamper-evident y accesorios clínicos para organizar fármacos, dispositivos y monitorización. Alta maniobrabilidad, superficies lavables y configuración pensada para reposición y control diario.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Cierre centralizado** con perilla para precinto tamper-evident; compatible con sellos seriados (8 uds.) para trazabilidad de aperturas.
- **Llave de bloqueo** de cajones para resguardo del contenido.
- **Bandeja porta-monitor** en acero inoxidable, estable y desmontable.
- **Porta suero** telescópico con gancho
- **Canasto lateral** con 2 depósitos para punzocortantes + cubeta multiuso.
- **Tabla de RCP azul** con dos asas laterales para extracción rápida.
- **Doble basurero** con tapa para segregación de residuos.
- **Asas múltiples:** laterales (3 por lado) y traseras, todas en acero, más parachoques inferior.
- **Cajonera con cierre suave (soft-close):** evita golpes al cierre en situaciones de respuesta rápida.
- **Porta-etiqueta exterior por cajón:** identificación inmediata de vías aéreas, fármacos y dispositivos.

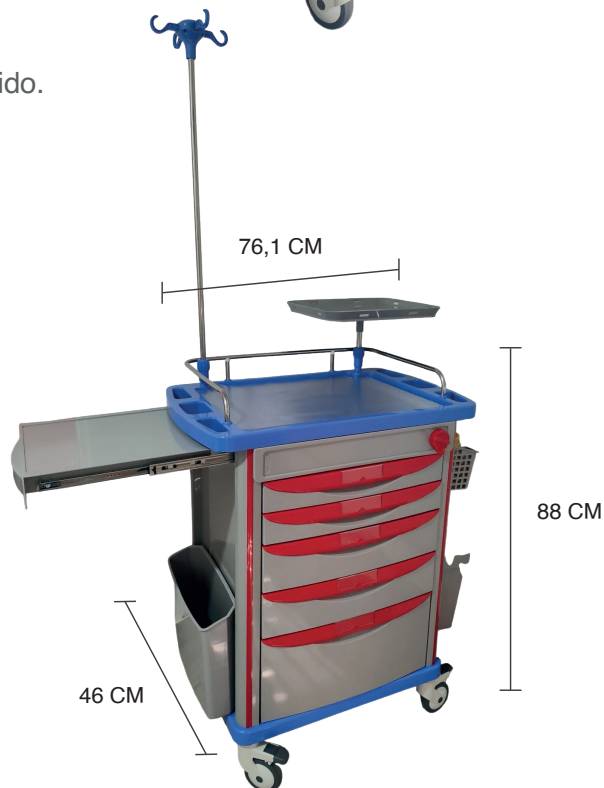

MUEBLES CLÍNICOS

CARRO PARO ABS 750

RLIMP007

- **Ruedas antiestáticas Ø100 mm:** mejor rodado en superficies hospitalarias y menor atracción de polvo.
- **Zapatilla eléctrica** de 6 salidas con interruptor ON/OFF.
- **Superficie superior** con reborde antiderrame y barandas inox perimetrales.

MODO DE USO:

- **Posicionar** Active frenos antes de la intervención. Rotule cajones desde los porta-etiquetas y cierre sin golpear (el soft-close completa el cierre). Para traslado, libere frenos y empuje desde las asas.
- **Configurar cajones con separadores** según protocolo (vía aérea, fármacos, etc.).
- **Ajustar porta suero** y montar la bandeja porta-monitor; verificar firmeza.
- **Use la bandeja retráctil** como meseta de preparación; deposite material en basureros según codificación.
- **Instalar y rotular contenedores** de punzocortantes y segregar residuos en basureros.
- **Tras la atención,** reponer stock, colocar sello seriado, registrar N° en check-list y limpiar.
- **Para traslado,** liberar frenos y empujar desde las asas; evitar sobrecargar la superficie superior.



MUEBLES CLÍNICOS

CARRO PARO ABS 750

RLIMP007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CARRO PARO ABS 750
Código	RLIMP007
Materiales	Cuerpo en ABS médico; barandas, porta suero, porta-monitor y asas en acero inoxidable
Dimensiones generales	46 cm (Largo) × 76,1 cm (con agarradera) × 88 cm (con barra)
Peso	36 kg (producto) – 39,85 kg (con embalaje)
Movilidad	4 ruedas hospitalarias antiestáticas Ø100 mm (2 con freno / 2 libres), giro 360°.
Cajonería y organización	2 Pequeños 46,5 ancho x 41 largo x 6,5 alto / 2 Medianos 46,5 ancho x 41 largo x 10,5 alto / 1 Grande 46,5 ancho x 40,5 largo x 16,5 alto. Riel telescópico metálico y sistema de cierre suave; porta-etiqueta exterior por cajón; 30 separadores mixtos 6×(9×42,2), 6×(8,5×37,5), 12×(6×37/42,2), 6×(12–12,2 × 37–42,2) cm
Superficie superior	Bandeja ABS con reborde antiderrame + barandas inox
Accesorios incluidos	Bandeja porta-monitor inox 38,1×33,2×3,3 cm - porta suero telescópico con gancho - canasto lateral con 2 depósitos para punzocortantes (34×14×17 cm) - doble basurero con tapa - zapatilla 6 tomas con interruptor ON/OFF - tabla de RCP azul 52,5×39×2 cm con 2 asas - asas laterales (3 por lado) y traseras
Acabado / color	ABS bicolor (gris/azul o gris/rojo, según serie) + inoxidable
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	12 Meses




MUEBLES CLÍNICOS

CARRO PARO ABS 750

RLIMP007

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

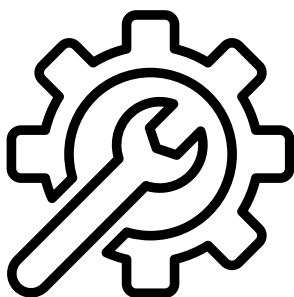

- ABS: Paño + detergente neutro; desinfectar con alcohol 70%, amonio cuaternario o hipoclorito $\leq 0,1\%$. No usar solventes ni abrasivos.
- Acero inoxidable: Limpiar con detergente neutro, desinfectar suave, enjuagar y secar para evitar manchas.
- Cajones/rieles: Retirar separadores, limpiar y secar; si hay ruido, 1 gota de silicona en rieles.
- Ruedas y frenos: Limpieza e inspección semanal; quitar hilos/polvo y reapretar tornillos sueltos.
- Residuos/eléctrico: Cambiar bolsas y punzocortantes al 75%; mantener zapatilla seca y sin sobrecarga.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Carga: Distribuir peso priorizando cajones inferiores; evitar objetos punzantes sueltos (usar contenedores).
- Traslado y estacionamiento: Mover desde las asas con frenos liberados; activar frenos en uso y en ascensores.
- Uso seguro: No subirse al carro ni usar porta-monitor/porta-suero como punto de tracción.
- Seguridad de fármacos: Mantener precintos y llave controlados; registrar N° de serie en cada apertura.
- Orden y guarda: Rotular insumos y fechas; almacenar en lugar seco, bajo techo, evitando golpes y derrames.