

LÍNEA INSTRUMENTAL

CAJA ACERO INOXIDABLE

20X10X4 INSTRUMENTAL QUIRURGICO

RLIMP015

RLIMP015 Caja Acero Inoxidable sanitaria compacta para almacenamiento y traslado de insumos e instrumental menor en botiquines, maletines y carros de rescate. Su formato delgado, apilable y de fácil sanitización optimiza espacio y agiliza la reposición en contextos clínicos y de emergencia.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Higiene superior:** interior continuo sin cantos cortantes - Limpieza rápida y segura.
- Operación eficiente:** cierre firme y apertura rápida con guantes.
- Portabilidad y orden:** perfil delgado, apilable, con peso balanceado para el transporte.
- Visibilidad y cuidado del material:** acabado satinado que reduce la adherencia de suciedad y marcas.
- SL304 real (grabado visible):** alta resistencia a corrosión y químicos de uso habitual.



LÍNEA INSTRUMENTAL

CAJA ACERO INOXIDABLE

20X10X4 INSTRUMENTAL QUIRURGICO

RLIMP015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CAJA ACERO INOXIDABLE - INSTRUMENTAL QUIRURGICO
Código	RLIMP015
Peso neto producto	324 gramos
Dimensiones producto	20 cm (Largo) x 10 cm (Ancho) X 4 (Alto)
Material	Acero inoxidable AISI 304 (grabado "SL304")
Acabado	Satinado (interior liso)
Tipo de cierre	Tapa encajable a presión, doble reborde
Geometría	Cuba embutida monobloque, esquinas redondeadas
Volumen teórico (externo)	0,80 L (800 cm ³ , calculado sobre medidas externas)
Volumen útil estimado	0,60–0,70 L (descuento por radios y solape de tapa)
Tolerancia dimensional	±3 mm
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	3 meses




LÍNEA INSTRUMENTAL

CAJA ACERO INOXIDABLE

20X10X4 INSTRUMENTAL QUIRURGICO

RLIMP015

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

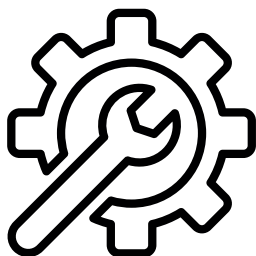

- Lavar con agua tibia + detergente neutro - Enjuagar y secar completamente.
- Desinfectar con alcohol $\leq 70\%$ o amonio cuaternario diluido.
- Compatible con autoclave de vapor 121–134 °C (mantener la tapa abierta durante el ciclo).
- Evitar cloro concentrado, abrasivos y lana de acero.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- No golpear, sobrecargar ni exponer a calor directo o atmósferas salinas.
- Mantener cortopunzantes en fundas.
- Revisar periódicamente el ajuste de la tapa y renovar etiquetas de identificación.
- Producto no hermético: no diseñado para transporte de líquidos a prueba de derrames.

