

EQUIPOS MEDICOS

BRAZALETE ADULTO

MONITOR 25-35 CM

RLEM1926

RLEM1926 Brazalete para medición no invasiva de presión arterial (NIBP) en brazo de adulto. Integra guías impresas de colocación (flecha/INDEX y zona MIN-MAX) para asegurar un ajuste correcto y mediciones reproducibles. La funda textil de alta resistencia con cámara neumática interna desmontable permite higiene eficiente y rotación frecuente en entornos clínicos.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Conjunto funda + cámara (bladder)** desmontable para lavado independiente de la funda.
- **Velcro** de sujeción firme y costuras reforzadas.
- **Marcadores gráficos** que agilizan la posición y la verificación de talla.
- **Superficie** de fácil limpieza para uso intensivo.



MODO DE USO

- **Mide la circunferencia del brazo** y confirma que está dentro de 25–35 cm.
- **Coloca el brazalete**, alineando INDEX con la arteria y cerrando dentro de MIN-MAX.
- **Conecta el tubo único** (1 vía) al equipo compatible y realiza la medición con el brazo en reposo.



EQUIPOS MEDICOS

BRAZALETE ADULTO

MONITOR 25-35 CM

RLEM1926

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	BRAZALETE ADULTO MONITOR 25-35 cm
Código	RLEM1926
Zona / talla	Adulto (brazo)
Rango de circunferencia	25-35 cm
Dimensiones de la funda (extendida)	14 cm (Alto) x 51,5 cm (Ancho Total)
Cámara neumática (bladder)	13,1 x 23,5 cm
Peso neto producto	91 gramos
Sistema	1 vía (un tubo)
Tipo	Reutilizable
Material principal	Funda textil con cámara interna de PVC
Libre de látex	Sí
Material	Funda textil de alta densidad - Cámara neumática interna
Compatibilidad	Monitores multiparámetros 1 vía, monitores de signos vitales 1 vía, esfigmomanómetro digital/aneroide 1 vía (puede requerir adaptador según marca)
Procedencia	Importación directa
Marca	Unimed Medical Supplies Inc.
Certificación	CE, UKCA, símbolos estándar (REF, LOT, UDI, "no estéril").
Garantía	3 meses




EQUIPOS MEDICOS

BRAZALETE ADULTO

MONITOR 25-35 CM

RLEM1926

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

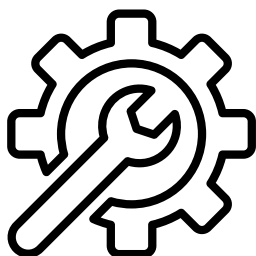

- Retira el bladder antes de lavar la funda.
- Lava la funda con agua tibia + detergente neutro; seca a la sombra.
- Limpia bladder y tubo con paño húmedo y alcohol $\leq 70\%$ o amonio cuaternario.
- No autoclaves ni uses cloro concentrado o solventes.
- Conserva el producto seco, protegido del polvo y de la luz directa; respeta las condiciones ambientales indicadas en la etiqueta del fabricante.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Utiliza solo la talla adecuada; no colocar sobre heridas, fístulas o vías venosas.
- Evita mantenerlo inflado por periodos prolongados.
- Revisa periódicamente velcro, costuras, tubo y conectores; reemplaza si hay daño o fugas.

