

EQUIPOS MEDICOS

BRAZALETE MONITOR

1 VIA ADULTO OBESO 33-47 CM.

RLEM2028

RLEM2028 Brazalete reutilizable para medición no invasiva de la presión arterial (NIBP) en brazo adulto obeso / adulto grande. Incorpora guías de colocación impresas (flecha ARTERY/INDEX y banda MIN-MAX) que facilitan un ajuste correcto y lecturas consistentes en clínica, urgencias y monitoreo continuo.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Conjunto funda textil + cámara neumática (bladder)** desmontable.
- **Velcro de alta adherencia** y costuras reforzadas para uso intensivo.
- **Limpieza sencilla** de la funda sin desmontar el sistema del equipo.
- **Señalética clara** para posicionamiento rápido y reducción de errores.



MODO DE USO

- **Verifica la circunferencia del brazo:** 33–47 cm.
- **Coloca el brazalete** con la flecha ARTERY/INDEX alineada a la arteria y cierra dentro de la zona MIN-MAX.
- **Conecta el tubo único** (1 vía) al equipo y realiza la medición con el brazo relajado y a la altura del corazón.



EQUIPOS MEDICOS

BRAZALETE MONITOR

1 VIA ADULTO OBESO 33-47 CM.

RLEM2028

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	BRAZALETE MONITOR 1 VIA ADULTO OBESO 33-47 cm.
Código	RLEM2028
Zona / talla	Adulto obeso / adulto grande (brazo)
Rango de circunferencia	33-47 cm
Dimensiones de la funda (extendida)	18 cm (Alto) x 65,5 cm (Ancho Total)
Bladder (cámara interna)	8 x 65,5 cm
Peso neto producto	145 gramos
Sistema	1 vía (un tubo)
Tipo	Reutilizable
Material de la funda	Textil de alta densidad (acabado liso, fácil de limpiar)
Material	Funda textil de alta densidad - Cámara neumática interna
Compatibilidad	Monitores multiparámetros 1 vía, monitores de signos vitales 1 vía, esfigmomanómetros digital/aneroide 1 vía (puede requerir adaptador según marca del equipo)
Procedencia	Importación directa
Marca	Unimed Medical Supplies Inc.
Certificación	CE, UKCA, símbolos estándar: No estéril, REF/LOT/UDI
Garantía	3 meses




EQUIPOS MEDICOS

BRAZALETE MONITOR

1 VIA ADULTO OBESO 33-47 CM.

RLEM2028

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

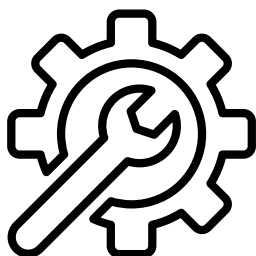

- Retira el bladder si vas a lavar la funda; usa detergente neutro y seca a la sombra.
- Limpia tubo y cámara con paño ligeramente humedecido y desinfectante compatible (p. ej., alcohol $\leq 70\%$ o amonio cuaternario).
- No autoclaves, no uses cloro concentrado ni solventes.
- Guarda en lugar seco, protegido del polvo, dentro de su rango ambiental indicado por el fabricante.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Utiliza solo en la talla indicada; no colocar sobre fístulas, heridas o extremidades con líneas venosas.
- Evita mantenerlo inflado por periodos prolongados.
- Revisa periódicamente velcro, costuras, tubo y conexiones; reemplaza si hay desgaste o fugas.

