

EQUIPOS MEDICOS

BRAZALETE MONITOR

1 VIA ADULTO OBESO MUSLO 46-66CM

RLEM2029

RLEM2029 Brazalete diseñado para la medición no invasiva de presión arterial (NIBP) en el muslo de pacientes adultos. Su estructura textil reforzada y cámara interna desmontable garantizan durabilidad y fácil mantenimiento. Compatible con monitores de una vía y equipos de signos vitales, adaptándose a una amplia gama de dispositivos clínicos.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Fabricado** en tela resistente de alta densidad
- Reutilizable y libre de látex**, seguro para pacientes sensibles.
- Bladder desmontable**, permite lavar la funda sin dañar el sistema neumático.
- Impresiones con indicadores MIN-MAX / INDEX** para una colocación correcta.
- Diseño ergonómico** que distribuye la presión de manera uniforme en el muslo.



MODO DE USO

- Colocar el brazalete** en el tercio medio del muslo, ajustando dentro del rango indicado.
- Alinear la marca INDEX** con la arteria femoral.
- Conectar el tubo** al monitor o esfigmomanómetro de una vía.
- Mantener la extremidad** relajada durante la medición.



EQUIPOS MEDICOS

BRAZALETE MONITOR

1 VIA ADULTO OBESO MUSLO 46-66CM

RLEM2029

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	BRAZALETE MONITOR 1 VIA ADULTO OBESO MUSLO 46-66CM
Código	RLEM2029
Tipo	Brazalete NIBP 1 vía
Zona de aplicación	Muslo adulto obeso
Rango de circunferencia	46-66 cm
Dimensiones funda	22 cm (Alto) x 77 cm (Ancho Total)
Cámara neumática (bladder)	13,1 × 23,5 cm
Peso neto producto	122 gramos
Vías	01
Material principal	Funda textil con cámara interna de PVC
Compatibilidad	Monitores multiparámetros, signos vitales y esfigmomanómetros de 1 vía
Estado de suministro	No estéril – reutilizable
Procedencia	Importación directa
Marca	Unimed Medical Supplies Inc.
Certificación	CE -ISO 13485 / ISO 81060-1
Garantía	3 meses




EQUIPOS MEDICOS

BRAZALETE MONITOR

1 VIA ADULTO OBESO MUSLO 46-66CM

RLEM2029

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

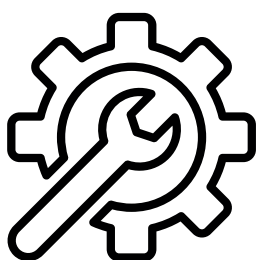

- Retirar la cámara neumática antes del lavado.
- Lavar la funda con agua tibia y detergente neutro.
- Limpiar el bladder con paño húmedo y alcohol $\leq 70\%$.
- No autoclave ni exponga a calor directo.
- Secar a temperatura ambiente y verificar ausencia de fugas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- No aplicar sobre heridas o extremidades con fístulas o vías venosas.
- Evitar inflar en exceso o mantener presionado por largos periodos.
- Revisar periódicamente el estado del velcro, costuras y tubo.
- Usar exclusivamente en equipos compatibles de una vía.

