


FÉRULA PÉLVICA

Ajustable Talla L

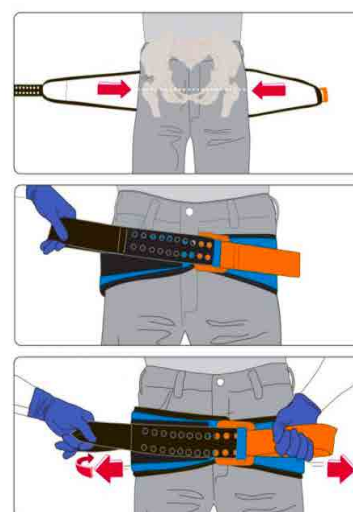

Producto Importado

RescateLife

WWW.RESCATELIFE.CL

Férula Pélvica L

Sistema de Velcro Ajustable

DESCRIPCIÓN

La **Férula Pélvica Talla L** ofrece una inmovilización óptima con un diseño centrado en la máxima comodidad y seguridad. Su versatilidad la convierte en la elección ideal para una amplia gama de situaciones, desde traslados post-traumáticos hasta procedimientos médicos especializados.

Versatilidad y Comodidad: Diseñada para resistir temperaturas extremas y exposición a objetos duros o afilados, la férula pélvica se adapta cómodamente durante períodos prolongados, asegurando la máxima comodidad para el paciente.

Seguridad Consolidada: El sistema de cierre con Velcro asegura la fijación correcta de la férula, proporcionando estabilidad y seguridad durante traslados y procedimientos médicos.

Facilidad de Aplicación: La correa de precisión con orificios de diseño exacto bloquea la hebilla AUTOSTOP, permitiendo una aplicación rápida y eficiente en situaciones críticas.


Diseño Ergonómico: La parte frontal estrecha y ahusada facilita la realización de procedimientos médicos como cateterismo urinario, radiología intervencionista, fijación externa y cirugía abdominal sin retirar el cabestrillo.

Fácil Mantenimiento: Fácil de lavar y descontaminar, garantizando una higiene óptima para su reutilización. Opta por la férula pélvica Talla L para una inmovilización efectiva y segura en situaciones médicas críticas.



Dimensiones	Largo 120 cm
Color	Azul
Código	RL170



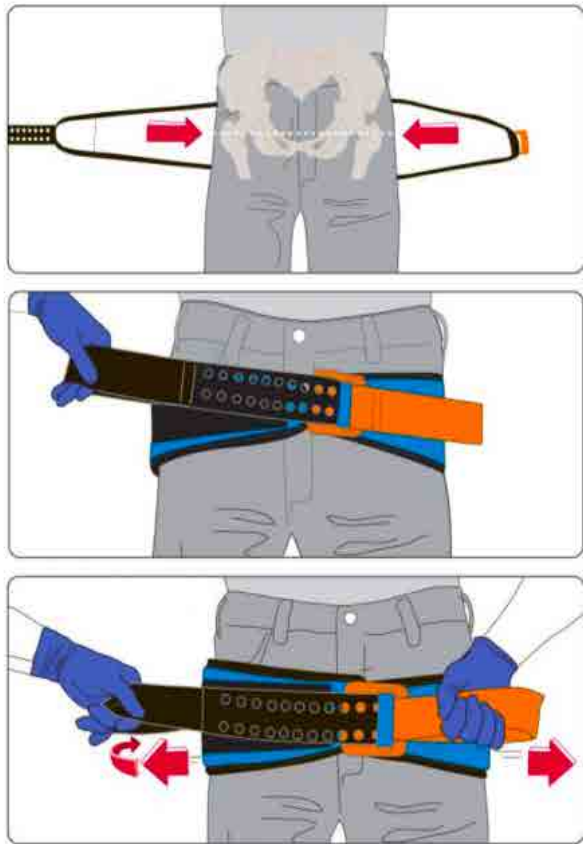

Ubicación y Preparación:

Coloca al paciente en posición supina y retira objetos de los bolsillos o área pélvica.

Posiciona la férula pélvica debajo del paciente, con la parte blanca hacia arriba, a nivel de los trocánteros mayores (caderas).

Fijación con Hebilla AUTOSTOP:

Pasa la correa negra a través de la hebilla y tira completamente.

Sujeta la correa naranja y tira de la correa negra en dirección opuesta hasta escuchar y sentir el clic de la hebilla. Puede escucharse un segundo clic, indicando que la férula está asegurada.

Ajuste Preciso y Cómodo:

Asegura la férula con el sistema de cierre Velcro, garantizando un ajuste firme y cómodo.

La correa de precisión con orificios bloquea la hebilla AUTOSTOP, asegurando una aplicación rápida y precisa.

Productos Relacionados



FÉRULA TRACCIÓN
Tipo Davis
Código RL360



CHALECO EXTRICACION
Uso Adulto
Código RL831